

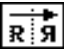


Risque de mauvaise interprétation de l'icône de miroir du système PCR Eleva 1.2

Systèmes concernés	Systèmes PCR Eleva 1.2
Description du problème	L'icône de miroir située au bas de chaque image risque d'être prise, à tort, pour un repère de plomb DROIT signalant le côté droit du patient, si l'image est miroitée dans un système PACS.
Risques liés au problème	La mauvaise interprétation de cette icône comme désignant le côté droit du patient risque d'entraîner une erreur de diagnostic.
Identification des systèmes concernés	Tous les systèmes PCR Eleva 1.2. La version logicielle s'affiche sur l'écran de démarrage, après la connexion au système. Les informations relatives à la version logicielle figurent également dans les données de la station de travail sous l'onglet Système (reportez-vous au chapitre 12 du Manuel d'utilisation).
Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné	<p>Le médecin risque de confondre l'icône de miroir imprimée avec un repère de plomb désignant le côté droit. Pour éviter ce problème :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lors de la lecture d'une image, le médecin ne doit pas se servir de l'icône de miroir  pour en déduire le côté de l'image. 2. Le personnel clinique doit respecter les consignes du Manuel d'utilisation et employer les lettres de plomb pour désigner la direction du corps et l'orientation du patient ou des repères électroniques équivalents indiquant les côtés gauche/droit, lors de l'acquisition d'images radiologiques.
Actions mises en œuvre par Philips Healthcare	<p>Philips installera une mise à jour logicielle comportant une nouvelle icône afin de réduire le risque de mauvaise interprétation de l'icône de symétrie. Nous mettrons également à jour le Manuel d'utilisation. La page révisée du Manuel d'utilisation sera fournie avec le pack logiciel. L'icône de symétrie d'origine  est remplacée par cette nouvelle icône : </p> <p>La mise à niveau logicielle est d'ores et déjà disponible et sera installée sur tous les systèmes concernés par un responsable technique Philips, à titre gracieux.</p> <p>Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence FCO-73200032.</p>
Informations complémentaires et assistance et assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole.