

Avis du service à la clientèle

Service: **AFTER SALES**

Objet: **BULLETIN TECHNIQUE L-017**

Date: **26.08.2011**

Produit: **PLANMECA DELIGHT**

Auteur: **Olli Heikkinen**

Publié par: **Maija Lampinen**

Avis de sécurité

Planmeca a été alertée de cas concrets d'explosion de l'ampoule Planmeca Delight et de projection de débris chauds provenant de la tête du scialytique.

En mai 2007, une membrane protectrice plus épaisse a été mise en service. Celle-ci doit être installée lors du prochain entretien annuel sur tous les scialytiques Delight fabriqués avant le 24 mai 2007 (équipés d'une membrane protectrice plus fine). Toutes les anciennes membranes protectrices doivent être remplacées d'ici la fin de l'année 2012.

Commandez votre nouvelle membrane protectrice auprès du service des pièces détachées de Planmeca en utilisant le code 10014291.

Remarque ! Le scialytique est équipé d'une ampoule halogène longue durée Osram 24 V 150 W Xenophot, numéro HLX 64642. Le numéro de référence de la pièce Planmeca est 436009. **Aucune autre ampoule ne doit être installée.**

Remarque ! Lorsque vous manipulez l'ampoule, utilisez le capuchon de protection pour ampoule. Ne touchez pas les surfaces de l'ampoule avec les doigts.

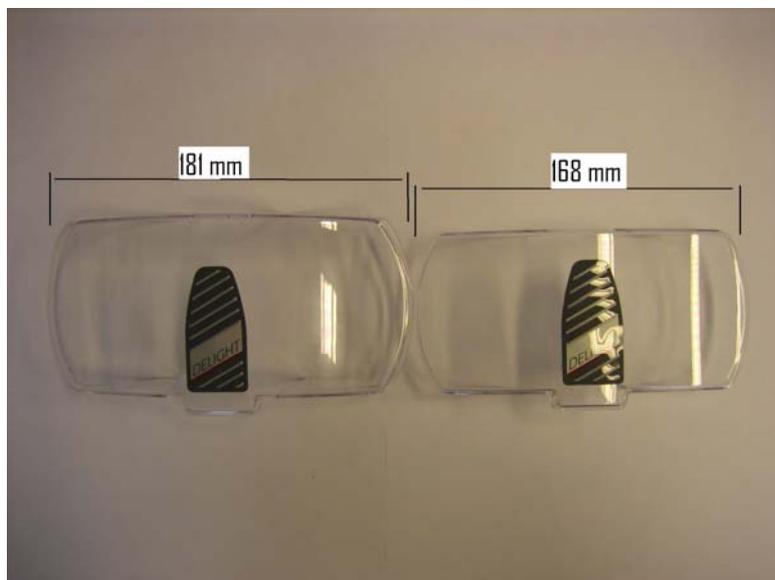


Figure 1 Nouvelle membrane protectrice plus épaisse à gauche ; ancienne membrane protectrice plus fine à droite.

La signature ci-dessous confirme que cet avis a été transmis à l'organisme de réglementation approprié.

Olli Heikkinen, Directeur de la qualité