
Information sécurité- Bulletin mise à jour corrective

SonoSite® Échographes MicroMaxx® et échographes M-Turbo®

FSCA – 19.07.2011

Mise à jour système calcul EOBC®

Courtaboeuf le, 27 Octobre 2011

Chers clients,

Par cette lettre nous vous informons que SonoSite®, Inc. a développé une correction volontaire pour les systèmes M-Turbo® et MicroMaxx®. Au cours de son processus de développement, les ingénieurs SonoSite® ont découvert une anomalie dans le calcul du ratio S/D pour les systèmes M-Turbo® et MicroMaxx équipés de l'extension de calcul logiciel OB/GYN nommé EOBC®. Lorsque vous effectuez le calcul du ratio S/D, si et seulement si le curseur de la mesure systolique est repositionné après enregistrement de celle-ci, le ratio S/D affiché en bas de l'écran n'est pas rafraîchi par la nouvelle mesure. Le calcul du ratio S/D est valable seulement lorsque le curseur-mesure de la valeur systolique n'est pas réajusté après enregistrement de la valeur initiale ou lorsque les mesures systoliques et diastoliques sont consultables dans le rapport du dossier patient en cours d'examen.

Afin de vérifier si votre système dispose des extensions de calcul OB/GYN (EOBC®), veuillez suivre cette procédure de contrôle:

1. Allumez le système.
2. Appuyez sur la touche « config » en haut à droite de votre pupitre de commande
3. Cliquez à l'aide de la souris sur l'onglet « information système »
4. Vérifier si la notification « EOBC® » apparaît dans la liste d'options

Si cette option est présente sur le système, il est nécessaire d'installer la nouvelle version logicielle dans votre système M-Turbo® et/ou MicroMaxx® afin de procéder à cette correction. Pour obtenir cette mise à jour, gratuite et sans frais supplémentaire, nous vous prions de bien vouloir nous retourner par Fax/email/courrier le coupon d'information ci-joint complété dans les plus brefs délais.

Service technique SonoSite® France

ZA de Courtaboeuf

19, Avenue de Norvège

Les Fjords Immeuble Véga

TEL : 01 69 18 96 33

Fax : 01 69 28 04 64

@ : nabil.ferchichi@sonosite.com

Afin de garantir un maximum d'efficacité, nous avons besoin de tous les renseignements demandés dans la fiche d'information : Assurez-vous de nous communiquer le nom du responsable du système et l'adresse de livraison du kit de mise à jour logiciel.

De plus, merci de diffuser ce bulletin d'information à l'ensemble des utilisateurs et personnes responsables de votre échographe M-turbo® et/ou MicroMaxx®.

Pour toute question relative à ce bulletin d'information, veuillez contacter le service technique SonoSite® France au numéro ci-dessus.

L'ensemble de l'équipe SonoSite® vous adresse ses excuses les plus sincères pour ce désagrément et reste à votre disposition pour tout complément d'information.

L'ensemble de l'équipe SonoSite® France vous adresse ses sincères salutations,

Gilles BOUTET

Directeur Général SonoSite® France