

Urgent Field Safety Notice

AVIS DE SECURITE TERRAIN

Parker 500 **ID 111011AHE** **Risque de choc électrique**

Date: 13 – 10 – 2011

Attention : Les utilisateurs de la baignoire Parker 500 doivent immédiatement cesser de l'utiliser et doivent déconnecter la baignoire du réseau électrique.



Détails sur les appareils concernés:

L'ensemble des baignoires Parker 500 dont les numéros de modèle commence par AL2xxxx-xx.

Description du problème:

Un mauvais positionnement du câble d'alimentation peut engendrer un écrasement de ce dernier par le vérin de hauteur variable ce qui pourrait potentiellement causer un choc électrique avec le risque de blessures graves ou de mort.

Conseils sur les mesures à prendre :

Toute utilisation doit cesser immédiatement et la baignoire doit être déconnectée du réseau d'alimentation électrique.

La baignoire doit être mise en quarantaine en attente de modification.

La modification consistera dans le repositionnement du câble d'alimentation secteur ou dans le remplacement complet de celui-ci.

Merci de contacter votre représentant ArjoHuntleigh afin de programmer une intervention si ce n'est déjà fait.

Transmission de l'avis de sécurité terrain (le cas échéant):

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes susceptibles d'être en possession d'un appareil potentiellement affecté.

Arjo Hospital Equipment AB
Verkstadsvägen 5
PO Box 61
SE-241 21 Eslöv, Sweden
Phone: +46 [0] 413 645 00
Fax: +46 [0] 413 138 76

Nordea Bank Sweden AB
IBAN SE64 3000 0000 0303 0780 0954
Bankgiro 191-6733
Org nr 556247-0145, F-skattebevis
VAT no.: SE556247014501
www.arjohuntleigh.com



Contact:

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter :

Quentin Denuelle
Coordinateur Qualité Produit
Par téléphone : 03.20.28.13.13
Par email : qualite.france@arjohuntleigh.com
ArjoHuntleigh France
2, Avenue Alcide de Gasperi
BP133 - 59436 Roncq Cedex France

Nous regrettons les inconvénients occasionnés, mais nous vous prions de respecter les consignes de sécurité présentées dans ce document.

Merci de contacter la société ArjoHuntleigh en cas de questions complémentaires par rapport à ce sujet.

La personne ci-dessous confirme que les agences réglementaires compétentes ont été informées.

John Wennborg, Eslöv 13-10-2011

Arjo Hospital Equipment AB
Verkstadsvägen 5
PO Box 61
SE-241 21 Eslöv, Sweden
Phone: +46 [0] 413 645 00
Fax: +46 [0] 413 138 76

Nordea Bank Sweden AB
IBAN SE64 3000 0000 0303 0780 0954
Bankgiro 191-6733
Org nr 556247-0145, F-skattebevis
VAT no.: SE556247014501
www.arjohuntleigh.com

