

Avril 2012,

Information de sécurité concernant le manuel d'utilisation du défibrillateur Argus Pro life care 2

Madame, Monsieur,

La société Schiller AG a mis en œuvre entre le 25 et 30 mars 2012, de sa propre initiative, une action corrective portant sur les manuels d'utilisation défibrillateurs « **Argus Pro Life care 2** ».

Effectivement nous nous sommes aperçus que la version du manuel d'utilisation livrée (2.510847draft03_FR_APLC2) avec les défibrillateurs avant mars 2012 contenait certaines informations erronées sur les modalités de l'acquisition du signal ECG pour la synchronisation, reprises pages 77, 84 et 89.

Il est important de rappeler que l'acquisition du signal ECG pour la synchronisation se fait uniquement à l'aide d'électrodes collables, de même que la stimulation ou la défibrillation. Cela permet de garantir une sécurité optimale en terme d'acquisition du signal ECG et lors de la défibrillation en mode synchrone.

Nous avons donc décidé de remettre à chaque client concerné un nouveau manuel d'utilisation portant la n° de Version 2.510847a_FR_LIFECARE2.

L'Affsaps a été informée de la mise en œuvre de cette action corrective.

Vous souhaitant bonne réception de la présente,

Christophe LEVEQUE.

Directeur Général

0820 202 225