

SAINT BONNET DE MURE, le 02 Avril 2012

## LETTRE D'INFORMATION




**MODELES CONCERNES : BRANCARDS MONOLOCS 440 /450 ET PORTOIR 400**

Madame, Monsieur,

Des erreurs de manipulation lors du chargement du brancard dans le véhicule ont pu être constatées chez certains clients.

Le brancard ne doit pas être chargé en position intermédiaire dans le véhicule, auquel cas, cette manipulation entraîne la perte du ressort de verrouillage du tirant de **béquille avant**. Ainsi la béquille avant ne se verrouille plus en position haute.

(Ressort conique voir photo ci-dessous).

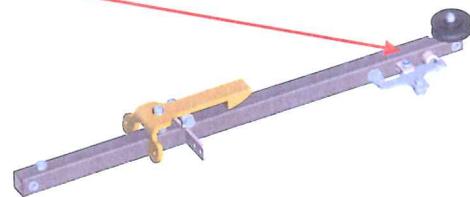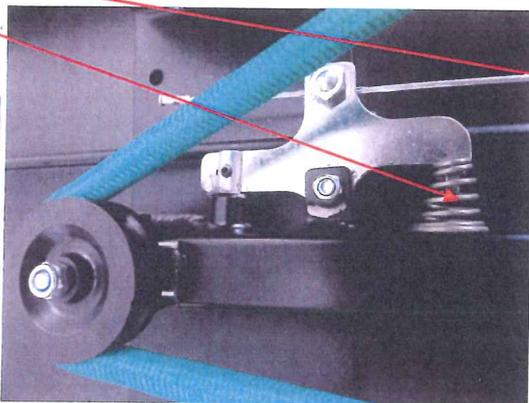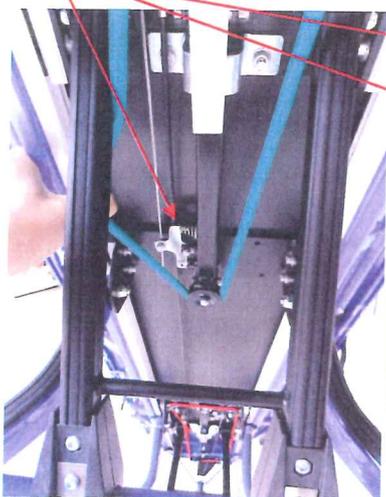

**LE CHARIOT BRANCARD OU LE PORTOIR DOIT ETRE SYSTEMATIQUEMENT EN POSITION HAUTE POUR LE CHARGEMENT DANS LE VEHICULE**

Nous vous remercions de vérifier si votre brancard est dans cette configuration. Si tel est le cas, veuillez contacter la société RTS CHAPUIS au 04.72.48.81.82 afin que nous vous fassions faire parvenir le nouveau ressort conçu pour éviter cette situation et le guide de montage. (La transformation dure environ 10 à 15 minutes).

Nous restons à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin.


Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Simon Dewavrin  
Service commercial

Patrice Vidal  
Service Qualité


## Remplacement ressort verrouillage position intermédiaire béquille avant série 400 ( PAGE 1 / 2 )

kit de modification du système de verrouillage  
des positions intermédiaires

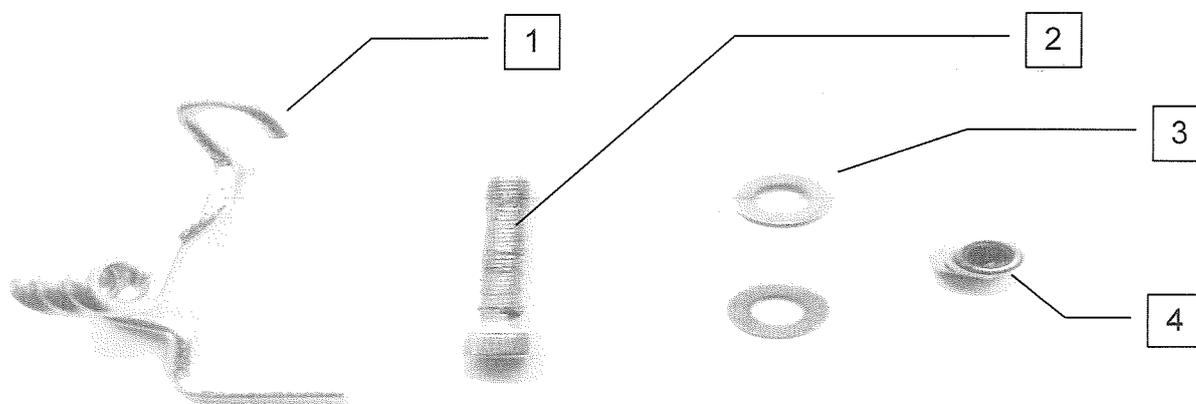

Repère	Désignation	Référence
1	<i>ressort</i>	<i>D06.155</i>
2	<i>vis chc 4 X 25 mm (x1)</i>	<i>D08.023</i>
3	<i>rondelle Ø 4 X 8 (x 2)</i>	<i>D08.024</i>
4	<i>écrou nylstop M 4 (x 1)</i>	<i>D08.025</i>


### outils nécessaires

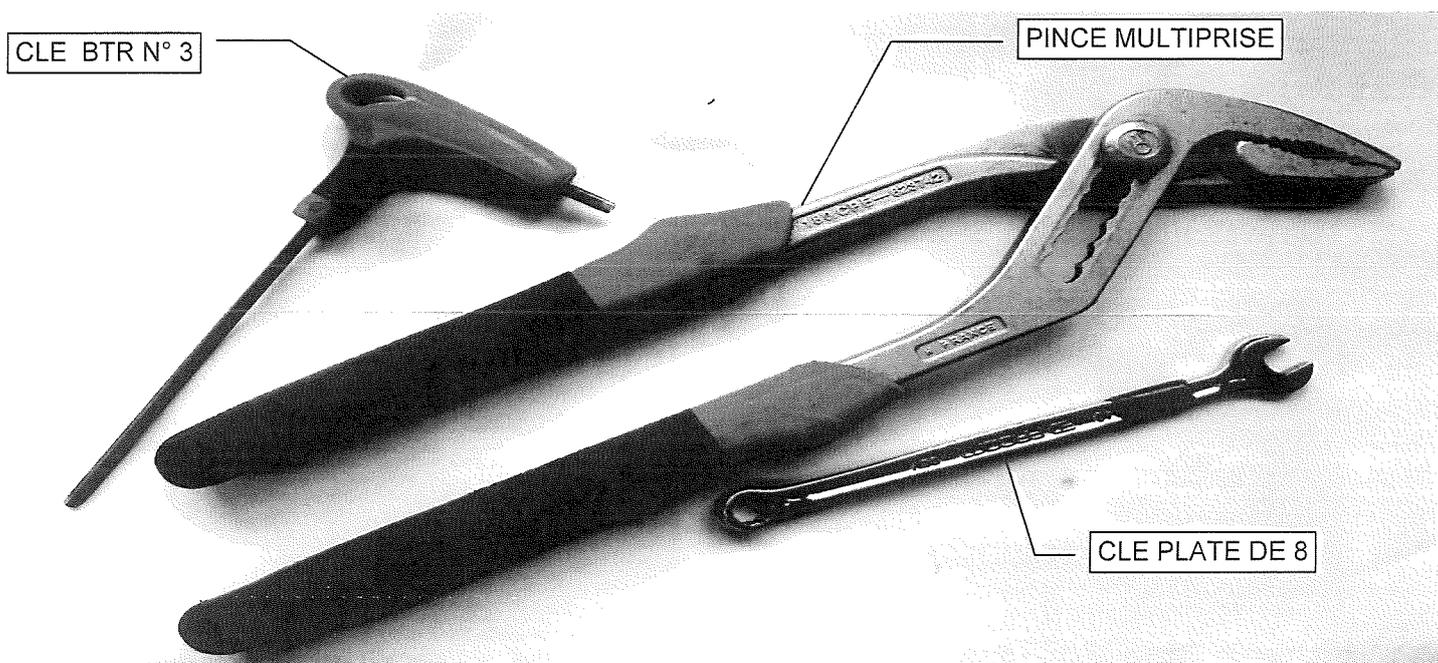

## Remplacement ressort verrouillage position intermédiaire béquille avant série 400 (PAGE 2 / 2 )

### mode opératoire

- 1°) repérer le système de verrouillage des positions intermédiaires de la béquille avant

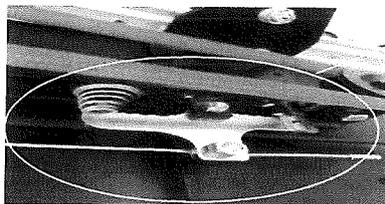


système de déverrouillage  
position intermédiaire  
béquille avant

- 2°) enlever le ressort conique  
3°) pour avoir accès à la tête de vis CHC 4 X 12, actionner la manette de commande jaune à l'avant du brancard pour mettre le brancard sur la première position intermédiaire,

- 4°) Démontez la vis de fixation du secteur

- 5°) **Mise en place du nouveau ressort de verrouillage :**



- a°) Mise en place de la vis de remplacement (vis CHC 4 x 25) + 1 rondelle Ø 4

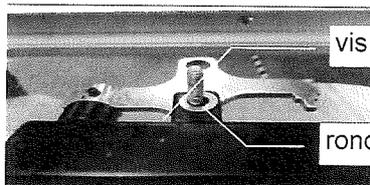



vis CHC 4 x 25

rondelle Ø 4

- b°) pré-positionnement du nouveau ressort + rondelle Ø 4 + écrou M4 nylstop

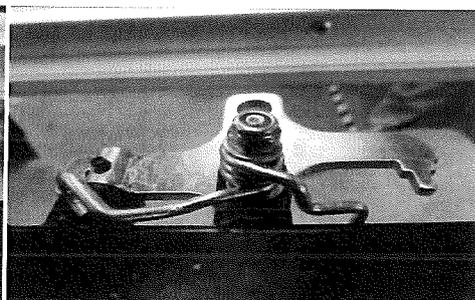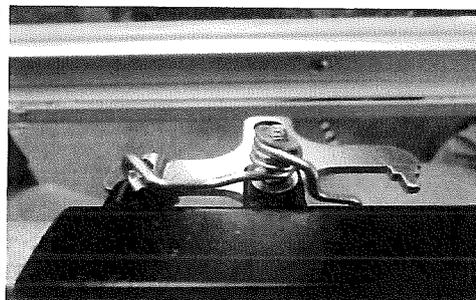

- 6°) Mise en place du ressort à l'aide de la pince multiprise

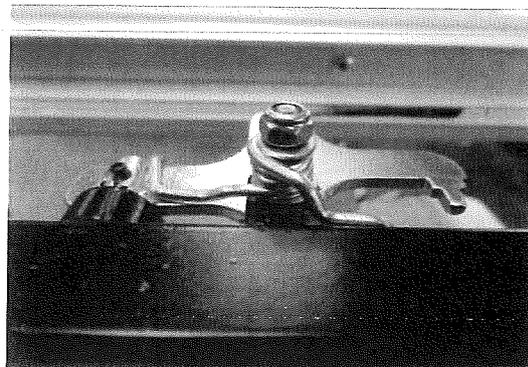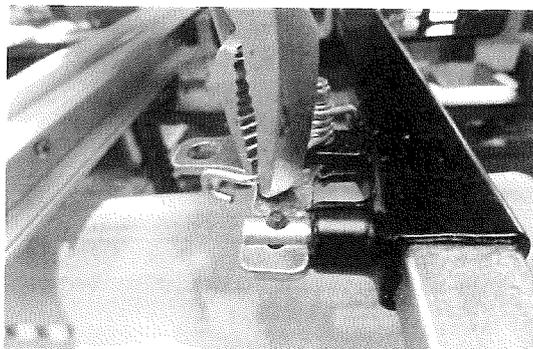

- 7°) vérification du fonctionnement