

## INFORMATION IMPORTANTE

---

### Mise à jour des plages de résultats attendus avec les solutions de Contrôle FreeStyle utilisées avec les électrodes FreeStyle PAPILLON Easy

---


Date : 21 juin 2012

Madame, Monsieur,

Chez Abbott Diabetes Care, nous contrôlons régulièrement nos processus afin de garantir la qualité et les performances de nos systèmes de surveillance de la glycémie.

Nous avons récemment identifié que les plages des résultats attendus avec les solutions de Contrôle FreeStyle imprimées sur les flacons des électrodes FreeStyle PAPILLON Easy nécessitaient une mise à jour.

Cette information ne concerne que les électrodes ayant un icône papillon et bénéficiant de la nouvelle technologie ZipWik pour une absorption instantanée de la goutte de sang (voir image ci-dessous)

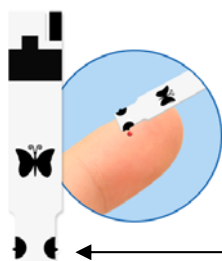

Zone de dépôt de la goutte de sang

**Ce changement de plages attendues pour les solutions de contrôle n'affecte pas les résultats de tests de glucose sanguin, il n'affecte pas les autres produits de la gamme Abbott Diabetes Care.**

Vous pouvez continuer à tester votre glycémie comme préconisé par votre médecin avec les produits FreeStyle.

Les solutions de contrôle sont utilisées pour vérifier le bon fonctionnement de votre lecteur de glycémie, de vos électrodes et votre méthodologie.

Reportez vous à la notice d'utilisation des électrodes ou à votre Manuel Opérateur du lecteur de glycémie pour obtenir les instructions sur la « Réalisation d'un dosage effectué avec les solutions de contrôle ».

Toutes les informations notées dans ces notices restent d'actualité et doivent être respectées.

#### **Ce que vous devez faire :**

Vérifier le numéro de lot imprimé sur votre flacon d'électrodes FreeStyle PAPILLON Easy



**Si ce numéro de lot est inférieur à 1258621**, utiliser les plages comme illustré dans le **tableau 1**.

**Si ce numéro de lot est supérieur ou égal à 1258621**, utiliser les plages comme illustré dans le **tableau 2**. (il se peut que les valeurs indiquées sur votre flacon d'électrode correspondent déjà aux valeurs du tableau 2)

**Tableau 1 (numéro de lot inférieur à 1258621):**

| Niveau Solution Contrôle | Plage attendue  |
|--------------------------|-----------------|
| Niveau Bas               | 30 – 60 mg/dL   |
| Niveau Haut              | 228 – 342 mg/dL |

**Tableau 2 (numéro de lot supérieur ou égal à 1258621):**

| Niveau Solution Contrôle | Plage attendue  |
|--------------------------|-----------------|
| Niveau Bas               | 30 – 60 mg/dL   |
| Niveau Haut              | 248 – 372 mg/dL |

Pour tout complément d'information, nous restons à votre entière disposition au numéro vert suivant :

 **N° Vert 0800 10 11 56**

(Appel de France métropolitaine, appel gratuit à partir d'un poste fixe) ou au

01 45 60 34 34 (appel de l'étranger ou DOM-TOM ou autre opérateur)

De 8h00 à 18h30 du lundi au vendredi

Ou par e-mail à [Service.Clients.ADC@Abbott.com](mailto:Service.Clients.ADC@Abbott.com)

Nous vous remercions de votre confiance témoignée envers Abbott Diabetes Care et les produits de la gamme FreeStyle

Bien cordialement,

J. Scott House  
Vice-président de Division, Assurance Qualité et Conformité