

À : Gestionnaire de Risques/Administrateur de l'Équipement

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N, Denmark
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com
CVR. nr. 27 70 67 46

Bulletin de sécurité

Produit : Cintre de levage GH3

11 Juillet 2012.



Modèles :
Article no. 550316 (medium)
Article no. 550057 (small)
Article no. 550058 (x-small)

Type d'action : Modification du manuel d'utilisation :

- Mise à jour et explication détaillée sur la façon d'attacher le harnais de levage sur le cintre

Réf : FSN/DK113

Historique :

Ces dernières années, nous avons rencontré sept incidents liés à l'utilisation du cintre de levage GH3 Guldmann. Une ou plusieurs des lanières n'ont pas été placées correctement dans les crochets situés à chaque extrémité des cintres ce qui a causé la chute partielle ou complète du patient de son harnais pendant l'opération de levage.

Action à mettre en place :

Le cintre de levage GH3 est un produit sûr et fiable et le risque d'accident est extrêmement minime. Néanmoins, afin d'assurer un levage ou un transfert de patient en toute sécurité, le personnel de soin doit impérativement vérifier que les lanières du harnais sont correctement placées dans les crochets du cintre et que le patient est correctement installé dans son harnais, et ce avant de procéder au levage du patient.

Nous avons par conséquent ajouté le paragraphe « Attacher le harnais de levage » dans le manuel d'utilisation.

La nouvelle instruction est en pièce jointe, et le nouveau manuel d'utilisation sera automatiquement envoyé à tous les clients en Août 2012. Le nombre de manuels d'utilisation correspondra au nombre de harnais commandés.

Communication de ce bulletin de sécurité :

Nous vous remercions de transmettre cette information à toutes personnes dans votre organisation/institution qui travaillent sur ces produits en question.


D'autre part, nous vous demandons de remplacer l'actuel manuel d'utilisation avec le nouveau manuel que vous recevrez en Août 2012 et d'en informer votre personnel à ce sujet.

V. Guldmann A/S confirme que toutes les autorités compétentes ont été informées de ce bulletin de sécurité.

Personne à contacter :

Si vous avez des questions sur cette notice et sur la procédure décrite ci-dessus, nous vous remercions de contacter votre représentant Guldmann.

V. Guldmann A/S

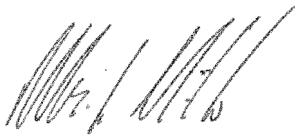

Ulrik Møller
Head of Technical Support

1.09

Harnais de levage

Un harnais de levage comportant quatre à six sangles de levage conçu pour un montage sur mousquetons doit être utilisé avec un cintre de levage Guldmann. Placez les sangles sur les mousquetons. Vérifiez que le cran de sûreté en caoutchouc retourne bien à sa position de départ, afin que les sangles ne se détachent pas de manière involontaire.

Harnais provenant d'autres fabricants

Guldmann ne sera pas responsable des défauts ou des accidents qui peuvent se produire lorsque vous utilisez des harnais de levage provenant d'autres fabricants.

En cas de doute concernant le choix ou l'utilisation d'un harnais de levage, veuillez contacter votre fournisseur.

Guldmann ne sera pas responsable des défauts ou des accidents dus à une utilisation incorrecte du harnais de levage ou à un défaut d'attention de la part du soignant ou de l'utilisateur.

Utilisation du GH3

Le GH3 se déplace facilement dans le système de rails, sans nécessiter de conditions particulières en matière d'espace ou de puissance. Il est donc possible de reporter toute l'attention à l'aspect fonctionnel pour l'utilisateur et à la technique du personnel assistant.

Si le module est utilisé correctement, l'utilisateur doit être levé juste au-dessus de la surface sur laquelle il est allongé, puis déplacé en conservant cette hauteur.

Fixation du harnais de levage

Placez les sangles du harnais de levage sur les mousquetons du cintre de levage. Commencez par le jeu de sangles supérieur (dans le dos) avant de passer au jeu de sangles inférieur (au niveau des jambes).

**NB NB!!
NEW TEXT**

Attention !

Soyez vigilant quand vous placez les lanières dans les crochets. Vérifiez que les lanières sont tirées à travers le cran de sécurité en caoutchouc et bien placées dans le crochet. Quand vous appuyez sur la télécommande pour soulever le patient, vérifiez encore une fois que toutes les lanières sont bien maintenues dans les crochets du cintre de levage. (fig. 1a and fig. 1b).

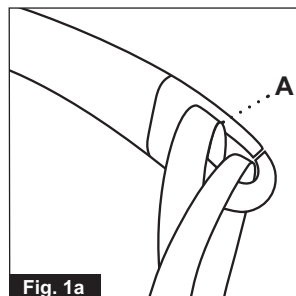


Fig. 1a

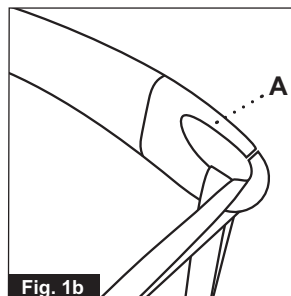


Fig. 1b

