



URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE

GE Healthcare

Technologie de l'information
GE Healthcare
540 W. Northwest Hwy
Barrington, IL 60010
États-Unis

Référence GE Healthcare: FMI 85231

31 juillet 2012

Destinataires: Directeur / Administrateur du service de Radiologie
Administrateur de l'hôpital
Chef du service de Radiologie
Administrateur du Système PACS
Correspondant local de matériovigilance

Objet: **Affichage inattendu des images lors de l'utilisation de la fonction Auto-Fetch (Extraction automatique) de Centricity PACS-IW**

GE Healthcare a récemment pris connaissance d'un problème avec la fonction Auto-Fetch de votre système Centricity PACS-IW.

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis et sont informés des mesures recommandées.

Problème de sécurité Un problème a été identifié avec l'utilisation de la fonction d'extraction automatique de la visionneuse PACS IW. Lors de l'utilisation de la fonction d'extraction automatique, l'image d'un autre patient peut s'afficher sans que l'utilisateur ne soit à l'origine de cette action. Cela risque de provoquer une analyse ou un rapport imprévu concernant le mauvais patient. Aucune blessure de patient n'a été signalée.

Instructions de sécurité Nous vous recommandons d'arrêter d'utiliser la fonction Auto-Fetch afin d'éviter l'affichage imprévu d'images d'un autre patient. Il ne faut pas accorder aux utilisateurs des privilèges quant à l'utilisation de la fonction Auto-Fetch.

Produits concernés Système PACS-IW GE Centricity ; versions du logiciel : 3.7.1 et ultérieure

Correction du produit Une correction permanente du produit sera fournie pour résoudre le problème ci-dessus.
Tant que la correction permanente du produit n'est pas disponible, veuillez suivre les instructions de sécurité ci-dessus.

Contact Veuillez contacter votre technicien de maintenance ou le représentant du service après-vente GE pour toute question relative à ce problème ou pour obtenir de l'aide quant à la suppression de privilèges des utilisateurs.
Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant : 0 800 15 25 25.

GE Healthcare confirme que l'ANSM a été informé de cet avis de sécurité.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre principale priorité. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement.

Cordialement,

Russell Roberson, PhD, P.E.
Vice-président QARA
Technologie de l'information GE Healthcare

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Responsable médical en chef
GE Healthcare