



URGENT – ACTION CORRECTIVE DE SECURITE

GE Healthcare

GE Healthcare IT
540 W. Northwest Hwy
Barrington, IL 60010
États-Unis

Référence GE Healthcare: FMI 85258, 85259

23 octobre 2012

Destinataires: Directeur / Administrateur du service de Radiologie
Administrateur de l'hôpital
Chef du service de Radiologie
Administrateur du Système PACS
Directeur du service de technologie de l'information
Correspondant local de Matéiovigilance

Objet: **Possible perte d'image dans les transferts d'examens C2C (Centricity to Centricity) de Centricity PACS**

GE Healthcare a récemment pris connaissance d'un problème de sécurité potentiel dû à une possible perte d'images associée au module de transferts d'examens C2C (Centricity to Centricity) de votre système Centricity PACS. Le module C2C permet d'établir un transfert d'examens entre deux systèmes Centricity PACS ou plus. Veuillez noter que ce problème est susceptible de se produire lorsque les examens sont envoyés d'un système Centricity PACS à un autre via le module C2C.

Veillez vous assurer que tous les utilisateurs potentiels de votre établissement ont pris connaissance de cet avis de sécurité et des actions recommandées.

Problème de sécurité Lors d'un transfert d'examen C2C, une possible perte d'image peut se produire lorsque les images sont transférées depuis la source vers le serveur cible. Lorsqu'un autre processus du serveur cible tente d'accéder au même objet ou tableau, le processus de transfert d'une image peut être interrompu. Suite à cette interruption le transfert de l'image en cours d'envoi cesse et l'image suivante de l'examen continue d'être envoyée. Cette perte d'image est susceptible d'entraîner des erreurs de diagnostic.

Instructions de sécurité Les utilisateurs peuvent ne pas s'apercevoir qu'il manque une image puisque celle-ci est omise lors du transfert. Il est possible de vérifier le compteur d'images lorsque l'utilisateur expéditeur communique le nombre d'images envoyées au destinataire et que celui-ci confirme. Par précaution, les établissements doivent procéder à ce type de communication afin de confirmer que toutes les images ont bien été transférées lorsque des études sont transférées via un système C2C.

Produits concernés Centricity PACS version 3.X et ultérieure
Centricity PACS version 4.X et ultérieure

Correction du produit GE Healthcare fournira un correctif logiciel pour les systèmes 3.2.X et 4.0 afin de remédier au problème.

Contact Veuillez contacter votre représentant du service de technologie de l'information de GEHC pour toute question relative à ce problème

Vous pouvez aussi contacter le support technique au numéro suivant : 0 800 15 25 25.


GE Healthcare confirme que l'ANSM a été informée de cet avis de sécurité.

Soyez assurés que le maintien d'un niveau de sécurité et de qualité élevé est notre principale priorité. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter immédiatement.

Cordialement,



Russell Roberson, PhD, P.E.
Vice-président QARA
Technologie de l'information GE Healthcare

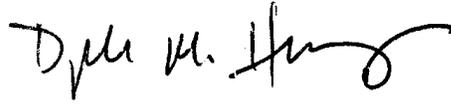

Douglas M. Hansell, M.D., MPH
Responsable médical en chef
GE Healthcare