


PRÉSENTATION

du stylo prérempli

ViraferonPeg®

Peginterferon alfa-2b

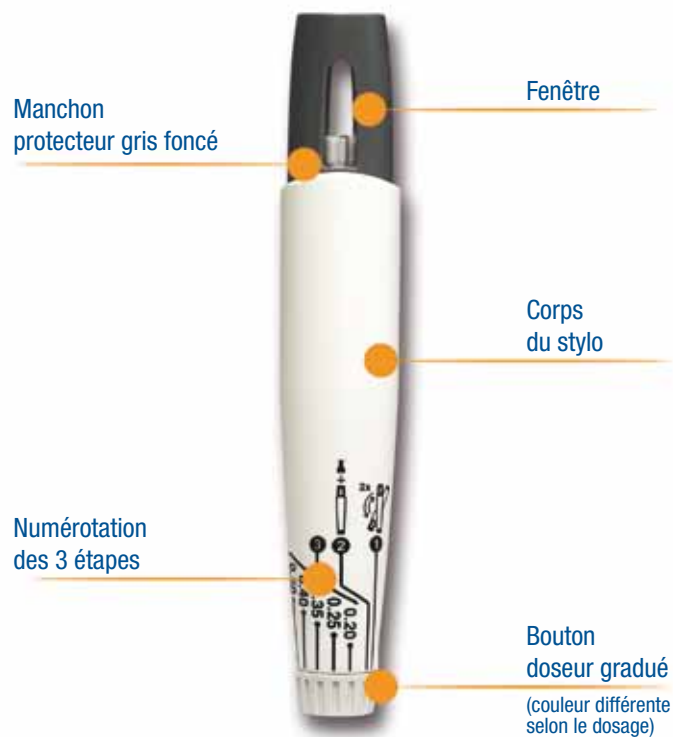

06-14 - INFC-1065919-0000 - Juin 2013

QUESTIONS FRÉQUENTES

sur le stylo prérempli

ViraferonPeg®

Peginterferon alfa-2b

- Qu'est-ce que le stylo-injecteur ?**
 C'est un dispositif qui vous permet de vous administrer vous-même votre traitement.
- Le stylo doit-il être conservé au réfrigérateur ?**
 Oui, entre +2° et +8° C. Attention, le stylo ne doit pas être congelé.
- Combien de temps dois-je laisser le stylo hors du réfrigérateur avant de l'utiliser ?**
 Environ quelques minutes pour qu'il revienne à température ambiante. L'injection sera plus confortable.
- Est-ce que le stylo a une date de péremption ?**
 Oui, elle figure sur chaque boîte. Si la date est dépassée, vous ne devez pas utiliser le stylo contenu dans cette boîte.
- Que se passe-t-il si j'ai fini de mélanger le produit dans le stylo mais ne l'utilise pas immédiatement ?**
 Une fois le produit mélangé, le stylo doit normalement être utilisé immédiatement. Mais il peut être utilisé dans les 24 heures si il est conservé au réfrigérateur.
- Comment savoir si la solution est prête à l'emploi ?**
 Après le mélange, la solution doit être limpide et incolore. Vous pouvez le vérifier à travers la fenêtre du stylo. Si la solution présente une coloration anormale ou contient des particules, n'utilisez pas le stylo.
- Est-il normal de voir perler du liquide après avoir mis l'aiguille en place ?**
 Oui. L'aiguille chasse automatiquement l'air contenu dans la cartouche. Ceci peut faire apparaître quelques gouttes qui peuvent sortir de l'aiguille.

REMARQUE : pour plus d'informations, se reporter à la notice et au mode d'emploi fourni avec le stylo.

- Comment repérer la dose à injecter ?**
 Le bouton-doseur comporte 5 graduations, signalées par un trait noir : 0,20 ml ; 0,25 ml ; 0,35 ml ; 0,40 ml et 0,50 ml.
- Comment savoir si j'ai injecté toute la dose ?**
 Maintenez 15 secondes le stylo contre la peau. Ces 15 secondes représentent le temps maximum pour injecter n'importe quelle dose. Jusqu'à 10 secondes, en fonction de votre dose, le stylo émet des clics. Attendez 5 secondes supplémentaires afin de vous assurer que la totalité de la dose a bien été administrée.
- Que faire du stylo après l'injection ?**
 Le stylo, l'aiguille et le matériel d'injection ne s'utilisent qu'une seule fois. Le stylo ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être jeté dans le récupérateur prévu à cet effet.
- Lisez attentivement le mode d'emploi fourni avec votre stylo. En cas de difficulté de manipulation ou si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à interroger votre médecin ou votre pharmacien ou à appeler le**

N°Vert 0 800 106 106

(de 7h à minuit - 7 jours sur 7)

Il est important de ne pas pratiquer vous-même l'injection si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris le mode d'emploi.

Stylo Clearclick

GUIDE D'UTILISATION

du stylo prérempli

ViraferonPeg®

Peginterferon alfa-2b

3 ETAPES

de préparation à l'injection

- MÉLANGER**
- FIXER L'AIGUILLE**
- DOSER**

& INJECTER

Lisez attentivement la notice et le mode d'emploi fourni avec votre stylo. Si vous vous posez des questions concernant l'injection, n'hésitez pas à interroger votre médecin ou votre pharmacien ou à appeler le :

N°Vert 0 800 106 106



Si vous souhaitez déclarer un effet indésirable ou un dysfonctionnement du stylo, téléchargez le formulaire ad-hoc sur le site www.anm.sante.fr et si besoin, faites-vous aider par votre médecin, votre pharmacien ou une association agréée.

RESPECTEZ SOIGNEUSEMENT LES 3 ETAPES DE PREPARATION A L'INJECTION, TELLES QUE NUMEROTEES SUR LE CORPS DU STYLO, ET LEUR ORDRE

1 MÉLANGER



- Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, avant de prendre le stylo.
- Placez le stylo verticalement, bouton doseur vers le bas.
- **Tournez le bouton doseur sur la position 1** vous pourrez entendre un "CLIC".



- Retournez doucement le stylo 2 fois, de haut en bas, pour mélanger.

NE SECOUEZ PAS LE STYLO POUR MELANGER.



- Vérifiez à travers la fenêtre du stylo que la solution est limpide et incolore. Des bulles peuvent être présentes mais cela est normal.

N'utilisez pas la solution si elle présente une coloration anormale ou si elle contient des particules.

2 FIXER L'AIGUILLE



- **Tournez le bouton doseur sur la position 2** vous pourrez entendre un "CLIC".



- Nettoyez le stylo au point de fixation de l'aiguille avec le tampon nettoyant



- Enlevez la languette de protection jaune de l'aiguille, avant de la fixer.



- Tenez le stylo verticalement, bouton doseur vers le bas, et poussez fermement l'aiguille capuchonnée vers le bas dans le manchon gris foncé du stylo. Vous pourrez entendre un léger bruit.
- Enlevez le capuchon de l'aiguille.

Vous pourrez voir quelques gouttes de liquide sortir de l'aiguille. Ceci est normal.

3 DOSER

Ma dose de ViraferonPeg® : ml



- Tournez le bouton doseur jusqu'à la dose qui vous a été prescrite. Vous pourrez entendre des clics en tournant le bouton.



Le manchon protecteur gris foncé SE DEPLACE automatiquement VERS LE HAUT pendant que vous tounez le bouton doseur. Vous pouvez ajuster la dose en l'augmentant ou en la diminuant avant l'injection.

& INJECTER



- Choisissez un site d'injection au niveau du ventre (abdomen) ou de la cuisse. Le site d'injection doit être différent à chaque fois.
- Nettoyez la peau avec l'autre tampon nettoyant, puis laissez sécher à l'air libre.
- Pincez un pli de peau dans la zone nettoyée.
- Pressez le stylo sur la peau dans cette zone.
- **Maintenez le stylo contre la peau pendant 15 secondes.**
- **Une fois le stylo retiré de la peau, il se bloquera et ne sera plus utilisable.**



Le manchon protecteur gris foncé va glisser en arrière pour permettre à l'aiguille d'injecter le médicament. Le stylo émet des clics pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 secondes - en fonction de votre dose. 5 secondes supplémentaires permettent d'assurer que la totalité de la dose a bien été administrée. **Une fois le stylo retiré de la peau, il se bloquera et ne sera plus utilisable.**

Après utilisation, jetez le stylo usagé dans un récipient fermé. Si nécessaire, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous procurer un récupérateur adapté.