

Nom Sylvie HEINZL  
Département Marketing  
  
Entité Healthcare Diagnostics  
Téléphone +33 1 49 22 90 11  
Fax +33 1 49 22 99 87  
Réf. FSCA POC 12-005A – mise à jour  
  
Date 16 décembre 2013

---

Siemens Healthcare Diagnostics S.A.S.  
9, boulevard Finot  
93527 Saint-Denis cedex 2  
[www.siemens.fr/diagnostics](http://www.siemens.fr/diagnostics)

---

**A l'attention du Responsable de Laboratoire,  
des Directeurs des Établissements de Santé et  
des Correspondants locaux de Réactovigilance**

## INFORMATION-RECOMMANDATION FSCA POC 12-005A – mise à jour

**Identifiants Patients incorrectement saisis  
sur les systèmes RAPIDPoint® 400/405, RAPIDPoint® 500 et/ou RAPIDLab® 1200**

**Informations complémentaires au courrier réf. FSCA POC 12-005A du 09 octobre 2013**

Cher Client,

Notre traçabilité indique que vous êtes utilisateur d'un ou de plusieurs analyseurs de gaz du sang RAPIDPoint 400/405, RAPIDPoint 500 et/ou RAPIDLab 1200.

Cette information client a pour objet de vous faire part de signalements clients concernant les systèmes mentionnés ci-dessus. Selon les rapports reçus, les utilisateurs peuvent, par inadvertance, entrer un numéro d'identifiant patient erroné au niveau de l'écran données démographiques ce qui peut finalement aboutir à une erreur d'identification de l'échantillon.

L'inadéquation entre l'identité patient et l'échantillon patient peut être provoquée par :

1. Sélection par inadvertance de la touche « dernier patient » sur la page des données démographiques ;  
Mesure : vous devez désélectionner la touche « Liste Patients » jusqu'à l'installation de la mise à jour du logiciel.  
Veuillez désélectionner la touche « Liste des Patients » selon la procédure indiquée dans le Manuel d'Utilisation, à savoir :

**Analyseurs RAPIDLab 1200** : dans l'écran Etat, sélectionnez Config. -> Fonctions protégées -> Options d'analyses, entrez votre mot de passe si demandé, désélectionnez la touche « Liste des Patients » puis sélectionnez la touche « Enregistrer ».

**Analyseurs RAPIDPoint 400/405 et RAPIDPoint 500** : dans l'écran Etat, sélectionnez Config. -> Fonctions protégées -> Options d'analyses, entrez votre mot de passe si demandé, désélectionnez la touche « Liste des Patients » puis sélectionnez la touche « Continuer ».

.../...

.../...

Note : veuillez vous assurer que cette procédure soit appliquée par une personne qualifiée de votre laboratoire.

2. Superposition des données démographiques échantillon par la manipulation incorrecte de la touche Liste Patients ;  
Mesure : vous devez désélectionner la touche « Liste Patients » jusqu'à l'installation de la mise à jour du logiciel.
3. Scan erroné du code-barres d'identification ;  
Mesure : dans le programme de formation individuelle sur site, l'accent sera mis sur l'importance de vérifier les informations démographiques avant de quitter l'écran des données démographiques.
4. Saisie manuelle erronée du numéro d'identification ;  
Mesure : vous pouvez activer la fonction saisie codes-barres uniquement.

**Dans chacun de ces cas, le manque de contrôle des données démographiques renseignées avant de passer à l'écran des résultats va attribuer une identité erronée à l'échantillon en cours d'analyse.**

Une mise à jour obligatoire du logiciel, où l'utilisateur sera tenu de sélectionner un patient donné, est prévue pour tous ces analyseurs de gaz du sang afin d'améliorer la manipulation de la sélection des critères de la Liste Patients (mesures prévues aux points 1 et 2 ci-dessus).

- Pour les analyseurs RAPIDLab 1200, cette mesure est actuellement disponible dans les versions de logiciel 3.2 et supérieur.
- Pour les analyseurs RAPIDPoint 400/405, cette mesure sera active dans la version de logiciel 3.9 disponible en janvier 2014.
- Pour les analyseurs RAPIDPoint 500, cette mesure sera active dans la version de logiciel 2.2 disponible en janvier 2014.
- Pour éviter la superposition des données démographiques, vous devez quitter l'écran Liste Patients en sélectionnant la touche « Retour » et non la touche « Continuer ».

Analyseurs RAPIDPoint 400/405 et RAPIDLab 1200



Bouton **Gris** Retour



Bouton **Vert** Continuer

Analyseurs RAPIDPoint 500



Bouton **Bleu** Retour



Bouton **Bleu** Continuer

.../...

.../...

Nous vous remercions de conserver ce courrier dans vos archives et **de transmettre cette information à toutes les personnes concernées de votre laboratoire et/ou impliquées dans les analyses des gaz du sang au sein des services de soins.**

L'ANSM a été informée de cette communication.

Dans le cadre de notre système d'Assurance Qualité, nous vous demandons de nous retourner impérativement l'accusé de réception ci-joint, complété et signé, par fax au 01 49 22 32 62.

Notre Centre d'Assistance Téléphonique, Technique et Scientifique est à votre écoute au 0811 700 720 pour toute aide ou information complémentaire.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée par cette situation.

Veillez agréer, Cher Client, l'expression de nos salutations distinguées.



Sylvie HEINZL  
Chef de Produits Gaz du Sang



Nathalie DUCROCQ-PARISOT  
Directeur Affaires Réglementaires - Qualité/HSE  
Siemens Healthcare

PJ : - Accusé de Réception à compléter et à retourner impérativement

Code Client :

N° incr. automatique : «Num»

Etablissement :

Laboratoire :

Ville :

**ACCUSE DE RECEPTION**  
**du courrier référence FSCA POC 12-005A – mise à jour, daté du 16 décembre 2013**

**INFORMATION-RECOMMANDATION**  
**Identifiants Patients incorrectement saisis**  
**sur les systèmes RAPIDPoint® 400/405, RAPIDPoint® 500 et/ou RAPIDLab® 1200**  
**Informations complémentaires au courrier réf. FSCA POC12-005A du 09 octobre 2013**

Nom du signataire : .....

Qualité : .....

- J'accuse réception de l'information ci-dessus référencée.
- J'ai transmis l'information aux services de soins de mon établissement
- J'ai mis en œuvre les actions recommandées dans mon laboratoire.

**Date**

**Signature**

**Cachet de l'établissement**

**Coupon complété à retourner par fax au 01 49 22 32 62**  
**Service Affaires Réglementaires / Qualité**  
**Siemens Healthcare Diagnostics**