

**SPECIMEN**

***Information de sécurité à la demande de l'ANSM***

Madame, Monsieur,

Vous utilisez un automate d'immuno-Hématologie.

Nous vous rappelons qu'afin de permettre l'affichage d'un phénotype sanguin rare de type D faible, vous pouvez autoriser la saisie manuelle du Du (Rhésus D faible) ainsi que la modification du Rhésus.

Cette option est paramétrable dans le menu des options installées. Pour l'activer merci de prendre contact avec notre service support.

D'autre part, nous nous proposons de mettre en place une sécurité supplémentaire afin de mieux contrôler l'intégration de résultats atypiques pouvant être transmis par votre analyseur (D faible, NI, DP...).

Pour ce faire, nos services prendront contact avec vous pour en planifier la mise en place à partir du 31 mars prochain.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sincères salutations.

**Eric LOCHE**

*Responsable Services Clients SGL*