

-1/3-

**URGENT – Notification de sécurité produit  
DigitalDiagnost**

**Remplacement du mécanisme de verrouillage du repose-pied sur le support patient du système  
DigitalDiagnost utilisé pour la fusion**


<b>Systèmes concernés</b>	Support patient du système DigitalDiagnost utilisé pour la fusion
<b>Description du problème</b>	<p>Le repose-pied du support patient utilisé pour la fusion peut être installé en position verticale. Lorsque le dispositif de fixation (crochet) n'est pas correctement positionné, le repose-pied n'est pas maintenu en toute sécurité. En cas de chute du repose-pied, le pied de l'opérateur ou du patient risque d'être blessé (par exemple, lors du déplacement du statif ou si l'opérateur ne le fixe pas correctement quand il soulève le repose-pied).</p> <p>Cette situation se produit en présence des facteurs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le crochet n'est pas correctement fixé ;</li> <li>- l'opérateur ne se rend pas compte que le crochet ne s'est pas correctement enclenché ;</li> <li>- le support patient est déplacé (sur roues) ;</li> <li>- le crochet ne maintient pas le repose-pied ;</li> <li>- le pied du patient ou de l'opérateur se trouve dans la "zone à risque".</li> </ul>
<b>Risques liés au problème</b>	Le crochet ne maintient pas correctement le repose-pied en position verticale. Le repose-pied risque donc de tomber ou de se balancer et ainsi d'occasionner des blessures pour l'opérateur ou le patient.
<b>Identification des systèmes concernés</b>	Tous les supports patients utilisés pour la fusion sont concernés par ce problème.

**URGENT – Notification de sécurité produit  
DigitalDiagnost**

**Remplacement du mécanisme de verrouillage du repose-pied sur le support patient du système  
DigitalDiagnost utilisé pour la fusion**

**Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné**


Le client/utilisateur doit toujours vérifier que le crochet est dans la bonne position et qu'il est bien verrouillé. (Appuyez sur le crochet jusqu'à ce qu'il s'enclenche) Assurez-vous que le crochet est dans la position illustrée sur la photo avec la flèche verte.

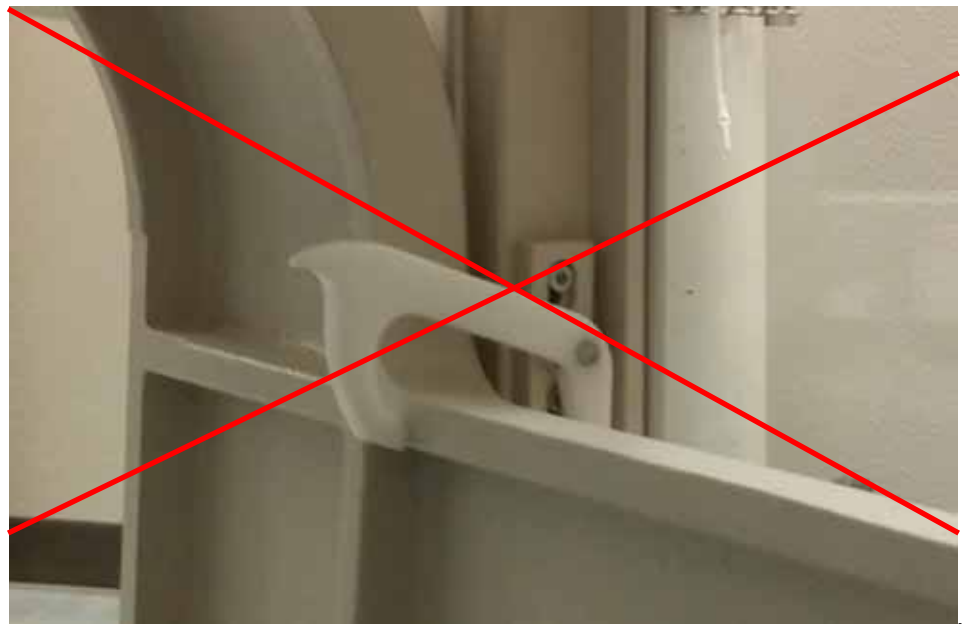

-3/3-

**URGENT – Notification de sécurité produit  
DigitalDiagnost**

**Remplacement du mécanisme de verrouillage du repose-pied sur le support patient du système  
DigitalDiagnost utilisé pour la fusion**

<p><b>Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné</b></p>	
<p><b>Actions correctives menées par Philips Healthcare</b></p>	<p>Philips prévoit de repenser la conception du mécanisme de roulement et de verrouillage. Un responsable technique Philips vous contactera dès la mise à disposition du kit d'action sur site correspondant. Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence FCO-71200111.</p>
<p><b>Informations Complémentaires et Assistance Technique</b></p>	<p>Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole</p>