



INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION  
SANGUINE

CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE POUR LES GROUPES SANGUINS  
(CNRGS)

Paris, le mardi 23 septembre 2014

TP/CS  
Div:32/2014

**Hématie n°8 (code 10217) du Panel national de référence d'hématies-tests CNRGS  
lot n° 2014-37**

**Possible présence d'un faible test direct à l'antiglobuline de type IgG selon les conditions techniques utilisées lors de la validation du dispositif à réception**

Madame, Monsieur,

Certains de nos clients ont émis une réclamation concernant l'hématie n°8 (code 10217) du Panel national de référence d'hématies-tests, lot 2014-37, suite à la découverte lors de la validation à réception du dispositif d'un test direct à l'antiglobuline faiblement positif de type IgG.

L'ensemble des investigations menées dans le laboratoire d'immuno-hématologie spécialisée du CNRGS ne permettent pas de reproduire ce phénomène.

Dans la mesure où l'hématie incriminée est la seule présentant le phénotype érythrocytaire RH:8 (critère réglementairement obligatoire pour un panel d'identification selon les dispositions de l'Arrêté du 26 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale), nous avons ainsi jugé préférable de mettre à disposition de l'ensemble de nos clients une nouvelle hématie (code 26729) présentant le même phénotype d'intérêt RH:8, en remplacement de l'hématie code 10217.

Ainsi, vous trouverez ci-joint :

- le nouvel antigramme portant un nouveau numéro de lot : Panel lot 2014-37bis.
- Une tubulure contenant l'hématie n°8 (code 26729) du Panel lot 2014-37bis.

Si vous avez observé sur l'hématie n°8 initialement distribuée un test direct à l'antiglobuline faiblement positif et/ou une faible réactivité systématique lors de la réalisation du test indirect à l'antiglobuline lors de l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires, nous vous demandons de bien vouloir :

- Détruire les hématies tests (code 10217) (n°8 du Panel lot n°2014-37) et de les remplacer par la nouvelle tubulure n°8 (code 26729) du Panel lot 2014-37bis.
- Utiliser le nouvel antigramme correspondant au Panel lot 2014-37bis.

Nous vous présentons nos excuses pour les désagréments encourus et nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées.



**INSTITUT NATIONAL DE LA TRANSFUSION  
SANGUINE**

**CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE POUR LES GROUPES SANGUINS  
(CNRGS)**

**Docteur Thierry PEYRARD**