

**URGENT – Notification de sécurité produit
MobileDiagnost wDR**

**Modification matérielle afin d'empêcher les mouvements involontaires du système
générés par des décharges électrostatiques**

Systèmes concernés	MobileDiagnost wDR
Description du problème	Si l'utilisateur déplace le système sur un sol ou revêtement isolés, puis sur une zone non isolée, mise à la terre, des décharges électrostatiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de la carte de commande numérique des déplacements du système, provoquant ainsi un mouvement involontaire, tel qu'une augmentation de la vitesse ou un changement de sens.
Risques liés au problème	La possibilité d'une collision avec le système est le seul risque associé à ce dysfonctionnement. Le mouvement est reconnu par l'opérateur. Si cela se produit, l'opérateur peut immédiatement arrêter l'appareil en relâchant la poignée (fonction de blocage de sécurité) et en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence.
Identification des systèmes concernés	Tous les systèmes MobileDiagnost wDR
Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné	L'appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité au niveau de la poignée de commande. Si l'utilisateur relâche la poignée de commande, l'appareil s'arrête. N'essayez pas de corriger le mouvement involontaire à l'aide des commandes de la poignée. Il est préférable d'arrêter immédiatement le système en relâchant entièrement la poignée de commande. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Soyez particulièrement prudents lorsque vous déplacez le système sur des bandes ou des plaques métalliques situées sur le sol ou lorsque vous entrez dans un ascenseur, car des décharges électrostatiques sont susceptibles de se produire dans ces situations. Si le client a un doute concernant cette action, nous l'invitons à contacter Philips.
Actions correctives menées par Philips Healthcare	Philips prépare actuellement un kit d'action sur site, qui permettra à un Responsable Technique Philips d'isoler électriquement de son cadre la carte de commande numérique des déplacements en remplaçant les boulons et les rondelles en acier inoxydable par des entretoises en plastique et des vis en nylon. Un Responsable Technique Philips vous contactera dès la mise à disposition du kit d'action sur site correspondant. Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence FCO-71200124.
Informations Complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole