


-1/2-

**URGENT – Notification de sécurité produit****Systèmes Allura. Plafonnier pour moniteurs doté d'un bras télescopique  
Dysfonctionnement du plafonnier pour moniteurs**

<b>Systèmes concernés</b>	<p><b>Systèmes :</b>  Allura FD10, FD20, FD10/10, FD20 biplan.  Integris H5000F/Allura 9F  Extensions de champ Cardio Integris  Extensions de champ Vasculaire Integris  Systèmes Allura : extensions de champ Cardio  Systèmes Allura : extensions de champ Vasculaire  Systèmes Allura : extensions de champ Cardio version 7.6  Systèmes Allura : extensions de champ Vasculaire version 7.6</p> <p><b>Codes produits :</b>  722003, 722010, 722011, 722012, 722013, 722017, 722121, 722122, 722123, 722124, 722133 et 722134</p> <p><b>Éléments concernés :</b>  Bras télescopique court : 989600-184-665  Bras télescopique long : 989600-184-654</p> 
<b>Description du Problème</b>	<p>Un cas de chute en position basse du système de plafonnier pour moniteurs nous a été signalé par un client.  Dans ce cas précis, le système de plafonnier est entré en collision avec le plan d'examen.  L'enquête a conclu qu'une erreur de montage du bras télescopique sur le plafonnier pour moniteurs était à l'origine de cette défaillance.</p>
<b>Risques liés au problème</b>	<p>Lorsque le plafonnier pour moniteurs chute en position basse, il risque d'entrer en collision avec un patient ou un membre du personnel présent dans la salle d'examen.  Le plafonnier pour moniteurs risque également d'entrer en collision avec d'autres équipements se trouvant à proximité immédiate.</p>
<b>Identification des systèmes concernés</b>	<p>Tous les systèmes Allura mentionnés ci-dessus. Les systèmes concernés seront clairement identifiés par votre établissement Philips local.</p>

-2/2-

**URGENT – Notification de sécurité produit****Systèmes Allura. Plafonnier pour moniteurs doté d'un bras télescopique  
Dysfonctionnement du plafonnier pour moniteurs**

<b>Action à mettre en œuvre par le Client /Utilisateur</b>	<p>Afin de prévenir tout risque pour les patients, les utilisateurs ou toute autre personne, nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous jusqu'à ce que l'action corrective soit mise en œuvre.</p> <p>Nous vous recommandons de ne pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- positionner ou déplacer le plafonnier pour moniteurs au-dessus du patient ;</li> <li>- laisser le personnel se tenir sous ou à proximité du plafonnier pour moniteurs.</li> </ul> <p>En outre, veuillez éviter tout mouvement inutile du plafonnier pour moniteurs et informer tous les utilisateurs du système de cette situation.</p>
<b>Action à mettre en œuvre par Philips Healthcare</b>	<p>Une action corrective de sécurité obligatoire sur site est prévue sous la référence FCO72200269.</p> <p>Elle consistera à remplacer le bras télescopique du plafonnier pour moniteurs concerné.</p> <p>Cette action corrective sera disponible en février 2015.</p>
<b>Informations Complémentaires et Assistance Technique</b>	<p>Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole</p>