

AVIS DE SECURITE URGENT

Description du produit : Automate Optilite, IE700

Identificateur FSCA - 13538/AE015

Type d'action - Avertissement

13 Mai 2015

Cher Utilisateur,

Détails du dispositif affecté: Cet Avis de Sécurité Urgent (ASU) concerne tous les automates Optilite, référence produit : IE700.

Description du problème: Le capot principal de l'automate doit toujours être en position d'ouverture maximale si l'accès est requis, c'est à dire lors des maintenances hebdomadaires ou mensuelles et lors de problèmes liés aux aiguilles ou aux cuvettes. Si le capot n'est pas entièrement ouvert (c'est à dire vertical, $>90^\circ$ du corps de l'automate), il y a un risque qu'il tombe soudainement ce qui peut potentiellement blesser l'opérateur. Des précautions sont fournies dans le manuel opératoire, pages v-vi (*INS700.OPT révision 5.2A, Juillet 2014*) ainsi qu'à l'intérieur du capot lui-même :



Lors de l'installation de l'automate, une formation est donnée aux utilisateurs, insistant sur le fait que lorsque l'automate est ouvert, le capot principal doit être en position d'ouverture maximale. Lors de l'ouverture et de la fermeture du capot, qui est lourd, il est nécessaire de le maintenir avec les deux mains afin d'éviter une fermeture accidentelle.

Actions à entreprendre: S'assurer que tous les utilisateurs, de routine et nouveaux, incluant ceux qui réalisent des maintenances de routine, aient compris que s'il est ouvert, le capot principal doit être en position d'ouverture maximale, en accord avec les étiquettes de précautions ainsi que les précautions fournies dans le Manuel Opératoire, pages v-vi et que les deux mains de l'utilisateur doivent être utilisées pour maintenir le capot lors de son ouverture et de sa fermeture. Les utilisateurs doivent être conscients du risque potentiel de blessure si ces instructions ne sont pas suivies.

The Binding Site Group Ltd
8 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, United Kingdom.
Tel: +44 (0)121 456 9500 Fax: +44 (0)121 456 9749
info@bindingsite.co.uk www.bindingsite.co.uk
Registered in England Number 5508774



Veillez confirmer, en renvoyant le formulaire électronique complété, que cet avis a été reçu et que les actions à entreprendre ont été réalisées.

Transmission de cet avis de sécurité: Veuillez transmettre cet avis de sécurité urgent à tous les utilisateurs de l'automate de votre organisation et conserver une copie du Manuel Opérateur de l'Optilite.

Nous vous prions de bien vouloir accepter nos excuses pour les désagréments potentiellement causés.

Sincères salutations,

Kirk Buller

Directeur des Affaires Réglementaires

The Binding Site Group Ltd.

The Binding Site Group Ltd

8 Calthorpe Road, Edgbaston, Birmingham, B15 1QT, United Kingdom.

Tel: +44 (0)121 456 9500 Fax: +44 (0)121 456 9749

info@bindingsite.co.uk www.bindingsite.co.uk

Registered in England Number 5508774

The Specialist Protein Company

