


11/09/2015

Chers Clients,

Nous avons décelé un risque de casse au niveau de l'articulation de la poignée de poussée en cas d'une utilisation non conforme à la notice d'utilisation. La présente est une **note importante** sur la manière dont vous devez utiliser la poussette quand vous la basculez pour franchir un obstacle.

La nouvelle notice d'utilisation a été complétée avec cette note.

ATTENTION ! Quand vous utilisez la poussette dans les escaliers ou que vous la portez, la poignée doit être rabattue vers le bas. Positionnez votre main au niveau de l'articulation de la poignée pour la sécurité de l'enfant.

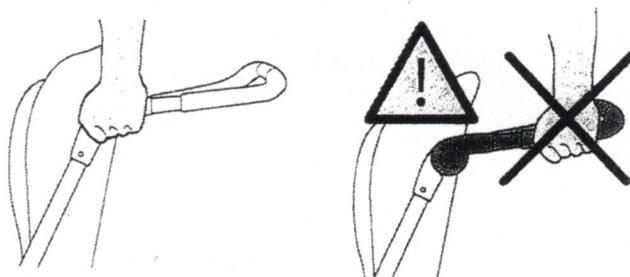

Cette note doit être transmise à toutes les personnes de votre organisation et la personne qui a fait acquisition du dispositif, dont la sécurité pourrait être mise en danger.

La personne signataire de ce document déclare que cette notice a été transmise aux autorités compétentes.

Stefan Helgebring
Technical Manager
Eurovema AB
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
Phone +46 371 390 100

