

Tomodensitométrie

Information client

**Ingenuity CT/Ingenuity Core/Ingenuity Core¹²⁸
Brilliance 64 CT/Brilliance iCT SP/Brilliance iCT**

**Problèmes avec les versions logicielles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 :
Indisponibilité de la fonction d'acquisition de perfusion**

Systèmes concernés	Ce problème est lié au logiciel. Les systèmes suivants équipés de l'une des versions logicielles suivantes sont concernés : Les systèmes TDM suivants sont susceptibles d'être concernés : Brilliance 64 Ingenuity CT Ingenuity Core Ingenuity Core128 Brilliance iCT SP Brilliance iCT Versions logicielles concernées : 4.1.2 4.1.3 4.1.4
Description du problème	Sur les systèmes TDM et les versions logicielles concernés, la fonction d'acquisition de perfusion peut être indisponible.

Tomodensitométrie

Information client

**Ingenuity CT/Ingenuity Core/Ingenuity Core¹²⁸
Brilliance 64 CT/Brilliance iCT SP/Brilliance iCT**

**Problèmes avec les versions logicielles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 :
Indisponibilité de la fonction d'acquisition de perfusion**

<p>Identification des systèmes concernés</p>	<p>Les systèmes suivants sont concernés :</p> <p>Brilliance 64 Ingenuity CT Ingenuity Core Ingenuity Core128 Brilliance iCT SP Brilliance iCT</p> <p>Déterminez si vous êtes en possession d'un système susceptible d'être concerné par ce problème, puis identifiez votre version logicielle.</p> <p>Pour identifier la version logicielle de votre produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cliquez sur le bouton "Help" (Aide). • Sélectionnez "About" (À propos de) pour afficher la version logicielle. <p>Les produits concernés afficheront l'une des versions logicielles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1.2 • 4.1.3 • 4.1.4
<p>Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur</p>	<p>Cette lettre d'information a pour objectif de vous informer que la fonction d'acquisition de perfusion peut être indisponible sur votre système TDM. Si vous avez d'autres questions/problèmes concernant la mise à jour de votre système, Philips vous conseille de contacter votre Responsable Technique Philips.</p>
<p>Actions menées par Philips Healthcare</p>	<p>Philips Healthcare informe les utilisateurs concernés par ce problème par l'intermédiaire de cette lettre d'information client.</p> <p>Une action corrective (FCO) consistant à installer une mise à jour logicielle sera mise en place pour corriger le problème.</p> <p>Un responsable technique Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour l'installation de la mise à jour logicielle sur votre site.</p>

Tomodensitométrie

Information client

**Ingenuity CT/Ingenuity Core/Ingenuity Core¹²⁸
Brilliance 64 CT/Brilliance iCT SP/Brilliance iCT**

**Problèmes avec les versions logicielles 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4 :
Indisponibilité de la fonction d'acquisition de perfusion**

Informations complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole.
---	--