

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

**Aux clients et utilisateurs des ventilateurs d'urgence
Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus et
Oxylog 2000 plus**

Novembre 2015

Consigne importante de sécurité !!!

**Oxylog 3000, Oxylog 3000 plus et Oxylog 2000 plus
Panne de la fonction de ventilation avec le message d'erreur « Poti unplugged »
(Potentiomètre débranché)**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre suivi de produits, nous avons été informés de cas où le message « Poti unplugged » (Potentiomètre débranché) était généré. Dans ces cas, une alarme sonore et visuelle est générée, la pression du système respiratoire retombe et la fonction ventilation s'arrête. Dans aucun de ces cas, des conséquences cliniques n'ont été rapportées.

Nos investigations ont permis de déterminer que le message d'erreur était causé par une augmentation de la résistance de contact des boutons tournants de réglage (potentiomètres de réglage). L'augmentation de la résistance est due à la formation d'une couche d'oxydation au niveau du potentiomètre de réglage sur une longue période. Cette couche d'oxydation ne peut se former que si les boutons tournants de réglage ne sont jamais ou presque jamais tournés. D'après notre suivi de produits, certains utilisateurs n'utilisent que rarement ou jamais le bouton tournant de réglage de la FiO₂.

C'est pourquoi nous recommandons vivement comme mesure préventive de tourner tous les boutons tournants de réglage au moins 10 fois, avec l'appareil à l'arrêt, jusqu'aux butées gauche et droite (valeurs minimale et maximale). Cette mesure suffit à nettoyer suffisamment la piste résistante des potentiomètres.

En particulier en cas d'erreur « Panne appareil – Poti unplugged », ce procédé peut également être utilisé pour remettre en fonctionnement l'appareil.

Drägerwerk AG & Co. KGaA,
23542 Lübeck
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
Adresse :
23542 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
Identifiant TVA : DE135082211

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN : DE95 2304 0022 0014 6795
00 Code Swift : COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN : DE15 2305 0101 0001 0711
17
Code Swift : NOLADE21SPL

Siège social : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance de Lübeck HRB 7903 HL
Complémentaire : Drägerwerk Verwaltungs
AG
Siège social : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance de Lübeck HRB 7395 HL

Président du conseil de
surveillance
de Drägerwerk AG & Co. KGaA et
de Drägerwerk Verwaltungs AG :
Prof. Dr. Nikolaus Schweickart
Présidence :
Stefan Dräger (Président)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Anton Schrofner

Un feuillet «**Supplément à la notice d'utilisation** » est joint à ce courrier.

Ce supplément complète le protocole de vérification de l'état opérationnel en demandant de tourner tous les boutons tournants de réglage une fois lors de chaque mise en service de l'appareil.

Nous vous rappelons que l'Oxylog ne doit être utilisé qu'une fois ce contrôle effectué. Veuillez insérer le feuillet dans votre notice d'utilisation et informer tous les utilisateurs concernés.

Nous regrettons les désagréments occasionnés dans le cadre de cette information, mais pensons que cette dernière est nécessaire en tant que mesure préventive pour renforcer la sécurité des patients et des utilisateurs.

Nous vous remercions pour votre coopération.

Sincères salutations,

Michael Großmann
Head of Product Management
Life Support Systems – Respiratory Care

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lübeck

Annexe :

- Feuillet de « Supplément à la notice d'utilisation »