

AVIS URGENT DE SÉCURITÉ

Précaution : Système de radiographie numérisée par rayons X DX-D 100 :

Comment déplacer l'unité manuellement

Cher Client,

Agfa HealthCare s'engage à vous apporter le meilleur service clientèle possible, ainsi que des produits et services de première qualité. Agfa HealthCare souhaite porter à votre attention les informations suivantes.

Dispositif :

Cet avis se rapporte à l'unité Système mobile de radiographie numérisée par rayons X **DX-D 100**.


Informations générales :

En cas de déplacement motorisé, il est impossible que l'unité ait besoin d'être déplacée manuellement. La procédure indiquant comment passer au déplacement manuel et l'outil nécessaire pour le faire sont indiqués dans le mode d'emploi et sont également expliqués ci-dessous.

Actions

- **Procédure pour passer du déplacement motorisé au déplacement manuel.**

”Si l'unité doit être déplacée manuellement, les deux vis d'embrayage (de type Allen) situées sous chaque roue doivent être retirées avec la clé Allen fournie avec l'unité. Ceci désaccouplera les roues des moteurs (en relâchant les freins), permettant le mouvement libre de l'unité.”

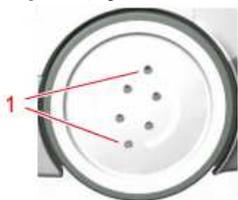


1. Vis d'embrayage

Ces informations peuvent également être trouvées dans le mode d'emploi (section « Fiches de dépannage »).

26/01/2016

PR1405160001-VR0000105

- **Stockage de la clé Allen**

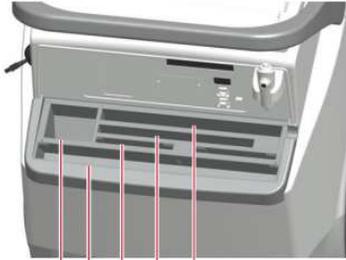

1. *Boîte ou rouleau de sacs de protection pour le détecteur*

La fente peut être utilisée pour stocker la clé Allen qui est utilisée pour désaccoupler les roues du moteur.

Ces informations peuvent également être trouvées dans le mode d'emploi (section « Conteneur de rangement »).

- **Mode d'emploi actuel**

Le mode d'emploi actuel (sur DVD) est ajouté à cette lettre.

Veuillez remplir le formulaire de commentaires dès que possible et nous le retourner.

Si les informations ci-dessus ne s'appliquent pas à votre établissement ou si le dispositif a été transféré vers une autre organisation, nous vous prions d'avoir l'obligeance de l'indiquer sur le formulaire de commentaires ci-joint et de passer cet avis urgent de sécurité à l'organisation où le dispositif a été transféré.

Nous vous remercions de l'attention que vous portez à ce problème et de votre soutien continu.

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez contacter votre organisation Agfa HealthCare locale :
Mr Dominique PRIGENT au **01 72 94 68 84**.

Cordialement,
Paul Merckx, Responsable de la division commerciale d'imagerie QARA



Agfa HealthCare NV
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
Belgique

26/01/2016

PR1405160001-VR0000105

AVIS URGENT DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE DE COMMENTAIRES

Nous vous demandons de bien vouloir renvoyer les informations ci-jointes dès que possible.
Nous vous remercions de votre coopération.

Client/nom de l'établissement :

Adresse :

Référence de l'avis :

PR1405160001-VR0000105

Référence du produit :

DX-D 100 N° de série :

- Je confirme que j'ai reçu et compris l'avis ci-joint.
- Le présent avis ne s'applique pas à mon établissement.
- Le dispositif a été transféré à une autre organisation.

Client

Nom :

Titre :

Signature :

Date :

Numéro de téléphone :

- Veuillez corriger nos coordonnées comme suit :

Client/nom de l'établissement :

Adresse :

Envoyez ce formulaire complété
par courriel à l'adresse stephanie.goumas@agfa.com en indiquant le code de référence
PR1405160001