



NOTE D'INFORMATION URGENTE

Le 15 février 2016,

Désignation	Référence	Conditionnement	Numéro de lot	Date d'expiration
BD SurePath™ GYN Preservative Collection Vial Kit	490527	Carton de 500 unités	Se référer à la liste jointe	
BD Surepath™ Collection Vial Replacement Cap	490505	Carton de 100 unités		
BD Kit PrepMate™ Installation	491288	Kit de 1 unité		

Chères clientes, chers clients,

BD a confirmé qu'une partie de différents lots de flacons de prélèvement BD Surepath™ peut contenir des bouchons fendus, ce qui peut entraîner une fuite du liquide de conservation.

Comme mentionné dans les fiches techniques de ces références, il est recommandé, lors de la manipulation de tout échantillon, de porter des équipements de protection, gants et protection des yeux/du visage, et de suivre les précautions liées aux risques biologiques appropriées. Les bouchons avec fuite peuvent augmenter le risque d'exposition à des agents chimiques ou biologiques.

Vous avez été livrés avec des flacons appartenant aux lots affectés cités dans le tableau ci-joint. Pourriez-vous s'il vous plaît ne plus utiliser ces lots et **éliminer**, selon les procédures standards de laboratoire, les flacons restants.

N'hésitez pas à nous contacter au 04 76 68 36 16 pour tout complément d'information.

Pourriez-vous compléter le formulaire joint, **que vous ayez ou non des flacons en stock** et le retourner par **fax** au **04 76 68 97 97**. Nous vous en remercions.

Dès réception du formulaire complété, **nous procéderons au remplacement des flacons éliminés.**

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser de la gêne occasionnée par cette situation et vous remercions de votre confiance.

Ann Vanlandschoot, Ph.D.
RA Manager Post-Market
BD Biosciences & BD Diagnostic Systems Europe/EMA

BD
11 rue Aristide Bergès
ZI des îles - BP4
38801 Le Pont de Claix Cedex
France
tel : +33 (0)4.76.68.36.36
fax : +33 (0)4.76.68.34.95
www.bd.com/france



FORMULAIRE / ACCUSE DE RECEPTION DE LA NOTE D' INFORMATION

N° de fax: 04 76 68 97 97

Merci de nous retourner ce formulaire en tant qu'accusé de réception de cette note d'information

Laboratoire: _____
Pas d'initiales, nom d'usage du laboratoire

Adresse: _____

Ville: _____ Pays: _____

Contact: _____

N° de téléphone: _____ N° de fax: _____

Nombre de flacons éliminés :

Désignation	Référence	Conditionnement	Numéro de lot	Date d'expiration
BD SurePath™ Preservative Collection Vial	490527	Carton de 500 unités		
BD Surepath™ Collection Vial Replacement Cap	490505	Carton de 100 unités		
BD Kit PrepMate™ Installation	491288	Kit de 1 unité		



LISTE DES LOTS AFFECTES

Désignation	Référence	Numéro de lot	Date d'expiration
Surepath Collection Vial Replacement Cap	490505	5068841	N/A
		5083935	N/A
		5117561	N/A
		5148682	N/A
		5148969	N/A
SurePath GYN Preservative Collection Vial Kit	490527	5058537	20180228
		5062884	20180228
		5072995	20180331
		5077993	20180331
		5091595	20180331
		5092812	20180331
		5096907	20180430
		5111748	20180430
		5114611	20180430
		5118509	20180430
		5119815	20180430
		5124528	20180430
		5132801	20180531
		5135799	20180531
		5139714	20180531
		5141835	20180531
		5155636	20180630
		5159991	20180630
		5160987	20180630
		5162962	20180630
5224627	20180831		
5229676	20180831		
5230761	20180831		
Kit PrepMate Installation	491288	5016715	20161231