

Date	Le 22 Septembre 2016
Objet	Ortho Clinical Diagnostics a le plaisir de vous annoncer la disponibilité de la version de logicielle 3.0 (MOD A7) pour les systèmes de Chimie Clinique VITROS® 5,1 FS.
Correctif d'anomalie avec la version de logicielle 3.0	<p>Cette mise à jour inclut un correctif à l'action corrective urgente (réf. CL2015-201) envoyée le 31 décembre 2015.</p> <p>La version de logicielle 3.0 résout les anomalies associées aux codes d'état U90-382/erreur de lavage (WE) IR. Le texte du code U90-382 indique maintenant que le seul but de la dilution est de déterminer si le code WE a été causé par une concentration d'analyte excédant la limite supérieure de la plage de mesures.</p> <p>NOTE : Les alarmes et codes figurant sur les rapports imprimés (réf : J12329FR, 2016/03/01) ont été mis à jour et sont disponibles sur notre site : http://www.orthoclinical.com.</p>
Activation de l'e-Connectivité	<p>La version de logicielle 3.0 active le modèle de connexion e-Connectivity® SSL. Le protocole SSL crée une connexion système fermée et protégée entre deux réseaux.</p> <p>IMPORTANT : Pour vous assurer que l'e-Connectivité ne soit pas interrompue sur votre système VITROS, vérifiez auprès du service informatique de votre site que les nouvelles adresses IP 216.34.120.125 et 63.137.181.40 sur le port 443 ont été ouvertes pour la nouvelle destination comme indiquée dans la précédente notification (réf. CL2016-009).</p> <p><i>Merci de bien vouloir vous reporter aux notes de mise à jour pour obtenir la liste complète des fonctions et améliorations de la version de logicielle 3.0.</i></p>
Disponibilité du logiciel	<p>Le logiciel sera disponible comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none">• Par téléchargement : si votre système dispose de la fonctionnalité e-connectivity™ et si cette dernière a été configurée pour permettre l'échange de données entre Ortho et votre VITROS®, la version 3.0 a été automatiquement chargée. Le logiciel est stocké sur le disque dur de l'automate dans un répertoire temporaire jusqu'à ce que vous le chargiez en suivant étape par étape le processus décrit dans les instructions d'installation.• Un logiciel (sous format CD) vous est adressé ci-joint. <p>Version de logicielle requise : La version logicielle 2.9 (ou une version plus récente) doit être installée avant de charger la version logicielle 3.0.</p>
Mesures à prendre	<ul style="list-style-type: none">• Avant de charger la version 3.0, assurez-vous que la version 2.9 est installée (Le numéro de version de logiciel en cours apparaît sur le coin supérieur droit de votre écran). Si vous ne disposez pas de la version mentionnée, vous devrez contacter notre Centre de Solution Technique Ortho Care pour vous la procurer.• Installez la version logicielle 3.0 sur votre système VITROS® 5,1 FS.• Conservez précieusement toutes documentations (CD, note d'information) pour toute utilisation future.

Publications	<p>Après l'installation de la version de logicielle 3.0, le bulletin technique « Mise à jour des actions de l'opérateur concernant l'erreur de lavage (IR) » (J56080) sera obsolète.</p> <p>Cette mise à jour de logicielle ne nécessite aucune révision des guides d'utilisation.</p>
Contact et informations complémentaires	<p>Pour toute question complémentaire, notre Centre de Solution Technique Ortho Care se tient à votre disposition au 03 88 65 47 33.</p> <p>Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Cher(e) client(e), l'expression de nos respectueuses salutations.</p>
PJ	<p>Notes d'information de la version logicielle 3.0 (n° J56088FR)</p>

Assia Baba-Ali
Responsable Affaires Réglementaires, Qualité et Compliance