

A l'attention des chirurgiens-dentistes

**M
A
T
E
R
I
O
V
I
G
I
L
A
N
C
E**

Sécurité des stérilisateur dentaires DAC Universal MKIII : risque d'ouverture du couvercle pendant le fonctionnement de l'appareil

L'ANSM a été informée, par le fabricant DENTSPLY SIRONA, d'un risque d'erreur de maintenance concernant les stérilisateur dentaires DAC Universal MKIII. Certaines vis du support du couvercle de l'autoclave, de taille 16 mm, pourraient avoir été remplacées, au cours des opérations de maintenance, par des vis erronées de taille 12 mm.

En effet, si des vis de 12 mm sont montées sur le support du couvercle d'un DAC UNIVERSAL MKIII, il est possible que le couvercle s'ouvre pendant son fonctionnement.

Afin d'éviter toute confusion, le fabricant DENTSPLY SIRONA a fourni à ses distributeurs de nouvelles vis, de taille 20 mm, en leur demandant de vérifier le type de vis monté sur le support de couvercle du DAC UNIVERSAL MKIII et de remplacer toutes ces vis, qu'elles soient de taille 12 ou 16 mm, par les nouvelles vis fournies de taille 20 mm.

L'ANSM recommande aux chirurgiens-dentistes concernés de contacter directement leur distributeur afin de s'assurer que les vérifications ont bien été réalisées.

Pour plus d'information :

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Sterilisateur-Dac-Universal-MKIII-Dentsply-Sirona-Information-de-securite>

Vous pouvez également adresser un courrier électronique à l'adresse suivante : dmdpt@ansm.sante.fr.

