



**Quelles mesures seront prises ?**

Les modules potentiellement concernés seront remplacés. En cas de défaillance du système, des procédures d'urgence standards doivent être appliquées. Veillez à les tenir prêtes jusqu'à ce que nos mesures correctives aient été mises en œuvre.

**Comment le problème a-t-il été décelé et quelle en est la cause ?**

Le problème a été décelé dans le cadre des observations régulières sur le terrain lors des sessions de maintenance programmée.

**Quelle est l'efficacité des mesures correctives ?**

- Le remplacement des modules potentiellement défaillants éliminera la cause du défaut et empêchera ainsi sa réapparition.

**Comment l'action corrective sera-t-elle mise en œuvre ?**

Notre service technique vous contactera sous peu pour convenir d'une date d'intervention. N'hésitez pas à prendre contact avec lui si vous souhaitez obtenir un rendez-vous plus rapidement. Ce courrier sera transmis à tous les clients concernés sous la référence AX008/16/S.

**Quels sont les risques pour les patients déjà examinés ou traités avec ce système ?**

Dans le cas présent, nous ne jugeons pas nécessaire de réexaminer les patients. Il s'agit d'un défaut matériel qui n'a eu aucune incidence sur le traitement des patients déjà examinés.


Nous vous remercions de votre coopération au regard de cette lettre de sécurité et vous invitons à la transmettre immédiatement à votre personnel concerné au sein de votre établissement et lui donner des instructions en conséquence. Merci également de transmettre les présentes informations de sécurité aux autres établissements qui pourraient être visés par cette action.

Si vous avez vendu cet équipement et qu'il n'est plus en votre possession, nous vous invitons à transmettre cette lettre de sécurité à son nouveau propriétaire. Merci également de nous communiquer les coordonnées de ce dernier.

L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé a été informée de cette communication.

Pour toute question relative à ce courrier, vous pouvez également contacter le centre de support client Siemens Healthcare SAS France au 0 820 80 75 69 et indiquer votre n° d'installation.

Veillez agréer, Cher Client, Chère Cliente, nos respectueuses salutations.

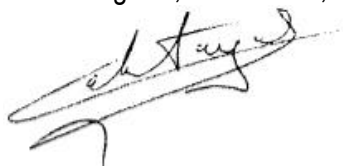

**Laurent CALATAYUD**  
Responsable d'Activité Radiologie



**Nathalie DUCROCQ**  
Directeur Affaires Réglementaires, Qualité & EHS