

Arrow International
c/o Teleflex Medical
IDA Business & Technology Park
Dublin Road, Athlone
Co. Westmeath, Irlande

10 avril 2017

URGENT – AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL

Nom commercial du produit concerné :	Kits ARROW® avec aiguilles Eclipse™ de BD
Type d'action :	Avis d'information
Référence Arrow :	EIF-000146
Référence produit/Numéro de lot	Voir l'Annexe 2

Cher client,

Informations détaillées sur les produits concernés

Arrow International a reçu un avis d'information produit urgent de Becton-Dickinson (BD) concernant leurs aiguilles Eclipse™. Arrow International a acheté ces aiguilles Eclipse™ à BD et les a conditionnées avec certains produits Arrow. Reportez-vous à l'Annexe 2 pour connaître la liste des références produit et des numéros de lot concernés.

Description du problème

Dans sa lettre (copie en Annexe), Becton-Dickinson (BD) explique avoir reçu des signalements indiquant le désengagement de la gaine de sécurité de son aiguille Eclipse™ ainsi que des blessures par piqûre d'aiguille. Selon les signalements des clients, dans certains cas la gaine de sécurité se désengage après avoir été placée sur l'aiguille, laissant cette dernière découverte et augmentant ainsi le risque de blessures par piqûre d'aiguille. Les signalements de certains clients font état d'un « clic » audible avant le verrouillage (l'activation) de la gaine de sécurité, suivi d'un second « clic » indiquant le verrouillage sur l'aiguille. Ce système est susceptible d'augmenter le risque de blessure par piqûre d'aiguille si l'utilisateur suppose que la gaine de sécurité est verrouillée après le premier « clic ».

CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ :

CONSEIL SUR LES ACTIONS À SUIVRE PAR LE PERSONNEL MÉDICAL

Nos rapports indiquent que votre établissement a reçu un produit concerné par cet avis de sécurité. Notez qu'il s'agit uniquement d'un avis d'information. Vous pouvez continuer à utiliser votre stock de produits finis contenant cette aiguille, et vous en recevrez toujours.

Arrow International demande à ses clients de prendre les mesures suivantes :

1. Veuillez transmettre cet avis de sécurité concernant un dispositif médical à toutes les personnes de votre organisation qui utilisent les produits Arrow contenant l'aiguille Eclipse™ de BD répertoriés en Annexe, et joignez une copie au produit concerné. Veuillez transmettre cet avis aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux centres logistiques/de distribution, etc.
2. Lorsque vous utilisez l'aiguille Eclipse™ de BD, suivez le mode d'emploi pour « placer votre pouce ou votre index sur le presseur de la gaine de sécurité et pousser cette dernière vers l'aiguille jusqu'à entendre ou sentir le clic du verrouillage. À l'aide de la figure 1, confirmez visuellement que la gaine de sécurité couvre l'aiguille. »

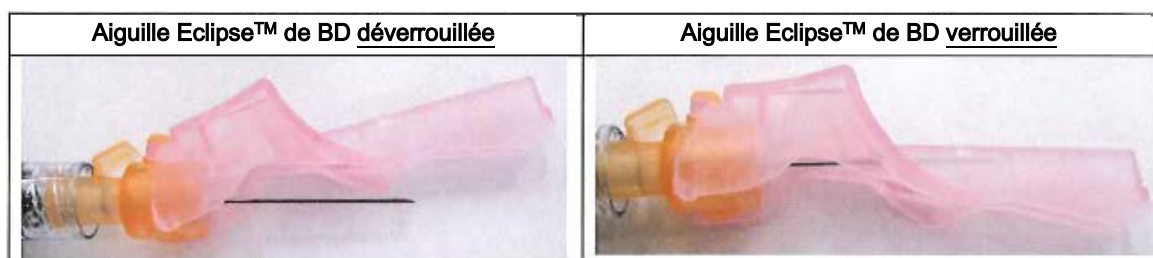


Figure 1 : Exemples de confirmation visuelle d'une aiguille Eclipse™ de BD déverrouillée et verrouillée.

3. Complétez le formulaire d'accusé de réception ci-joint (Annexe 1) et envoyez-le par fax ou par e-mail au Service Qualité (coordonnées ci-dessous). Vous confirmerez ainsi la réception de cette lettre. Ne suivez **pas** les instructions de la lettre de BD pour remplir le formulaire de réponse. À la place, remplissez et renvoyez le formulaire d'accusé de réception (Annexe 1), tel qu'indiqué ici.

CONSIGNES DESTINÉES AUX DISTRIBUTEURS DES PRODUITS CONCERNÉS

Si vous êtes un distributeur, veuillez transmettre cet avis de sécurité concernant un dispositif médical à tous vos clients qui ont reçu des produits concernés par cette mesure corrective de sécurité. Aucune action supplémentaire n'est requise.

Veuillez noter que toutes les autorités compétentes concernées des États membres de l'Espace économique européen/de la Suisse (EEE/CH) et de la Turquie seront informées par Arrow dans les cas où Arrow International a directement distribué les produits concernés.

Si vous êtes un distributeur et/ou que vous devez rendre des comptes dans ou en dehors de la zone de l'EEE/CH et de la Turquie, veuillez informer votre autorité compétente de cette action. Veuillez transférer la notification et toutes les communications avec votre autorité locale compétente à Arrow International.

Arrow International

Arrow informe tous ses clients, les employés d'Arrow et ses distributeurs de cette mesure corrective de sécurité.

Transmission de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes de votre organisation devant être informées et à toutes les organisations ayant reçu les dispositifs potentiellement concernés. Veuillez transmettre cet avis aux utilisateurs finaux, aux médecins, aux responsables de la gestion des risques, aux centres logistiques/de distribution, etc. Veuillez diffuser cet avis de sécurité jusqu'à ce que toutes les mesures requises aient été prises au sein de votre organisation.

Contact

Pour obtenir des informations supplémentaires ou de l'aide sur ce problème, veuillez contacter :

Service Qualité :

Contact : Carine Fournier

FAX : 05 62 18 79 82

Téléphone : 05 62 18 79 41

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

Arrow International s'est engagée à fournir des produits de qualité, inoffensifs et efficaces. Nous regrettons sincèrement toutes les perturbations occasionnées. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à contacter votre représentant local ou le Service Qualité.

Au nom d'Arrow International,

Padraig Hegarty

Padraig Hegarty VP, QA

Annexe 1

N° de client

CONSIGNES POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE LA MESURE CORRECTIVE DE SÉCURITÉ
FORMULAIRE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION

AVIS DE SÉCURITÉ CONCERNANT UN DISPOSITIF MÉDICAL PUBLIÉ PAR TELEFLEX -
AVIS À PRENDRE EN COMPTE IMMÉDIATEMENT

Réf. EIF-000146 – Kits ARROW® avec aiguilles Eclipse™ de BD

VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT RENVOYER LE FORMULAIRE REMPLI À :

FAX : 05 62 18 79 82

E-mail : productcomplaints.france@teleflex.com

Nous accusons réception de cet avis de sécurité concernant un dispositif médical et nous confirmons avoir lu et compris l'avis urgent relatif aux kits ARROW® avec aiguilles Eclipse™ de BD.

**NOM COMMERCIAL DES PRODUITS
CONCERNÉS :**

**Kits ARROW® avec aiguilles Eclipse™
de BD**

Veillez compléter ce formulaire d'accusé de réception et le retourner immédiatement au numéro de fax ou à l'adresse e-mail susmentionné(e).

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT (EX. NOM DE L'HÔPITAL, DE L'ORGANISME DE SOINS DE SANTÉ)	
ADRESSE DE L'ÉTABLISSEMENT	Téléphone/Fax
FORMULAIRE COMPLÉTÉ PAR :	Cachet
NOM EN MAJUSCULES : _____	
SIGNATURE : _____	
DATE	

Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch
ASK-04001-DU10	23F15L0662	ASK-04020-MUSC	13F16J0041	ASK-09801-ST	13F16B0103	ASK-42703-PRJ	13F16H0029	CA-42703-P1A	13F16B0140
	23F16A0298		13F16L0037		13F16D0034		13F16H0254		13F16C0113
	23F16B0338		13F17B0386		13F16F0011		13F16L0007		13F16C0187
	23F16C0321		23F15K0020		13F16F0167		13F16M0013		13F16D0050
	23F16C0632		23F15L0028	13F15G0116	13F17A0296	13F16D0183			
	23F16J0105		23F15M0248	13F15K0031	23F15H0023	13F16E0118			
	23F16K0449		23F16A0380	13F16A0198	23F16C0614	13F16E0176			
ASK-04001-DU4S	23F15K0375	23F16B0420	ASK-09803-ST	13F16C0022	ASK-42802-PHF2	23F16F0058	13F16F0195		
ASK-04001-DU4S1	23F15K0983	23F16C1098	ASK-12703-PRJ	13F16E0041	ASK-42802-PST1	23F16H0784	13F16G0047		
	23F15M0640	23F16D0981		13F16G0107		23F15L0211	13F16G0197		
	23F16H0879	23F16F0706		13F15H0116		23F15M0109	13F16H0105		
ASK-04001-DU5S	23F15J1102	23F16A0017	ASK-12703-PRJ	13F15H0232	ASK-42802-PST1	23F16A0678	13F16M0047		
	23F15K0441	23F16C0022		13F16A0239		23F16C0611	13F17B0152		
ASK-04001-DU5S1	23F15L0631	23F16D0903	ASK-15703-PRJ	13F16G0127	ASK-42854-PRJ	23F16F0057	13F17C0057		
	23F15M0638	23F16G0288		13F17B0279		23F16G0276	13F16A0037		
	23F16L0206	23F16K0396		13F16C0102		23F16H0427	13F16K0302		
ASK-04001-DU7	23F15K0345	23F16M0191	ASK-15703-PRJ	13F17B0265		23F16H0869	13F15H0195		
ASK-04001-DU8	23F15K0346	23F16B0560	ASK-15703-PST	23F15H0291	ASK-42854-PRJ	13F16B0187	13F15H0186		
ASK-04001-DU9	23F15L0593	23F16D0123		23F15J0493		13F16H0153	13F15K0273		
	23F16A0300	23F16F0676		23F15K0443		23F16J0194	13F15L0132		
	23F16B0028	23F16H0477	23F15L0772	23F16G0519	13F16A0181				
	23F16B0523	23F17B0281	23F15M0668	13F16L0026	13F16C0008				
	23F16J0151	23F16A0745	23F16C0430	13F16M0173	13F16D0048				
	23F16K0363	23F16B0517	23F16E0052	23F15H0111	13F16E0119				
	23F16K0431	23F16C0215	23F16F0931	23F15J0813	13F16H0093				
23F16K0820	23F16D0252	ASK-21142-HF2	23F15L0097	13F17A0157					
23F16L0181	23F16E1135	ASK-21142-HF3	23F16A0805	23F15L0209	13F17B0117				
ASK-04018-HCA	13F16K0085		23F16G0337	23F16C0559	23F15M0494	23F16B0383			
	23F15L0172		23F16H0831	23F16F0593	23F15M0984	23F16C0505			
	23F15M0324	23F16K0682	23F16J0827	23F16B0076	CA-45854-P1A				
	23F16A0393	23F17A0077	23F16K0685	23F16B0708	CA-47702-P1A				
	23F16E0381	13F16J0126	ASK-22122-MM	23F16B0882	23F16C0453	13F15H0181			
23F16G0598	13F16J0243	23F16E1096		23F16D0248	13F15H0275				
ASK-04018-ST	23F15J0121	13F16K0174		23F16H0392	23F16E0015	13F15M0159			
	23F15K0900	13F16M0091	23F16K0354	23F16E1075	13F16A0195				
	23F15L0580	23F15H0722	ASK-22702-CA	13F16H0081	13F16D0187				
	23F16A0921	23F15J0075	13F16M0301	23F16G0270	13F16L0209				
	23F16D0372	23F15K0096	ASK-29803-MM	23F15M0909	ASK-45703-PHMM1	23F15J1096			
	23F16E0822	23F15L0559		23F16C0275	23F16H0293	13F16L0048			
	23F16F1016	23F15M0173	23F16D0914	13F15H0190	23F15M0612				
ASK-04020-MHT	13F17A0040	23F15M0828	23F16E1217	13F15J0025	CDA-22122-U1A	23F16C0574			
	23F15K0258	23F16B0732	23F16H0493	13F15K0028		23F16D0090			
	23F15L0001	23F16B0773	23F16J0295	13F16B0113		23F16H0557			
	23F15M0014	23F16D0206	ASK-45703-PRJ	13F16D0026	13F16M0184				
	23F16A0001	23F16F0866		13F15H0270	13F16B0952				
	23F16A0817	23F16A0492		13F15L0045	23F16C0756				
	23F16C0532	23F16C0031	13F15L0110	13F16M0019	CDA-25123-1A				
	23F16D0305	23F16E0274	13F15L0163	13F17B0343	CDA-29803-1A				
	23F16E0982	23F16G0572	13F15M0118	13F16H0228					
	23F16F0788	23F16H0805	13F16A0100	13F16B0888					
	23F16G0772	23F17A0240	ASK-42703-PRJ	13F16A0225	13F15H0209				
	23F16H0752	13F15G0150	ASK-42703-PRJ	13F15H0209	13F15H0250				
	23F16J0136	13F15G0493		13F16D0006	13F15L0056				
	23F16K0287	13F15H0091		13F16D0125	13F16A0070				
	23F16K0765	13F15H0161		13F16E0075	13F16A0201				
23F16M0088	13F15M0002	13F16F0004		13F16A0201					
		13F16F0158	13F16B0096	13F16C0042					

Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch
CDA-29803-1A	13F16D0148	CDA-45703-P1A	13F16K0306	CH-45854-H	71F16L0175	DE-24701S-AG1	71F16D0546	DE-25703S-AG1	71F16D1416
	13F16D0186		13F16L0091	CH-47702-H	71F16D0364		71F16E0505		71F16E1086
	13F16E0086		13F17A0167		71F16F0822		71F16E1743		71F16F1498
	13F16F0023		13F17B0145		71F16H0300		71F16F1224		71F16F1883
	13F16F0234		23F15J0140		71F16H1146		71F16G1022		71F16H0772
	13F16G0079		23F15J0671		71F16K0075		71F16H0677		71F16H0924
	13F16M0122		23F16J0314		71F16L0979		71F16J1779		71F16H0937
23F15H0777	13F16A0171	71F17A1500	71F16K1245	71F16J0565					
CDA-29903-1A	13F15K0214	CDA-45854-P1A	13F16D0191	71F16B1962	71F17B0909	71F17B0909	71F17B0909	71F16J2167	
CDA-42703-P1A	13F15K0244	CDA-47702-P1A	13F15M0133	DE-04701-BGH	71F16C1543	DE-24701S-AGK	71F17B1779	DE-25703S-AGK	71F16M0402
	13F16A0253		13F17B0249		71F16D1010		71F16C0533		71F17A2345
	13F16B0143		23F15H0100		71F16F0248		71F16D0547		71F16C1437
	13F16C0077		23F16H0389		71F16G0840		71F16E0127		71F16D0138
	13F16D0081	CDC-41541-JX1A	23F16B0062	71F16J0605	71F16E1081	71F16D1711			
	13F16D0205	CDC-41552-JX1A	23F16J0195	71F16J1533	71F16F0260	71F16E1087			
	13F16F0139		23F15K0377	71F16K0478	71F16F1797	71F16F0266			
	13F16F0213	CDC-41563-JX1A	23F16H0074	71F16K1790	71F16G1021	71F16H0773			
	13F16J0016	CDC-42041-JX1A	23F15J1064	71F16M1481	71F16J1780	71F16H0925			
	13F16L0092	CDC-42052-JX1A	23F16G0546	71F17A1733	71F16J1927	71F16J0365			
	13F17A0022		23F16K0605	71F16E1739	71F16K1246	71F16J2165			
	13F17A0301	23F16D0269	23F16J0961	71F16H0059	71F17B0908	71F16K1581			
CDA-42802-P1A	13F15H0144	CDC-42063-JX1A	23F16J0961	DE-04701S-AGK	71F16J0600	DE-24703S-AGK	71F16L1514	71F16L1108	
	13F15H0182		23F16A0883	71F16K1261	71F16L1514	71F17A1919	71F16M0387		
	13F16A0090		23F16B0057	71F16D0604	71F16B0360	71F17B0562			
	13F16D0087		23F16C1099	71F16E1735	71F16C0559	DE-25855S-AGK	71F17A2102		
	13F16F0081		23F16F0374	71F16G0827	71F16C1441	DE-26702-DK	71F16M0165		
	13F16K0239		23F16K0474	71F16J1819	71F16D1743	71F17B2022			
	13F16L0285		CDC-42541-JX1A	71F16L2084	71F16E1110	EU-04041-HPMSB	13F15L0004		
CDA-42854-P1A	13F16A0074	CDC-42552-JX1A	23F15K0646	71F16M1440	71F16F1028	13F16K0297			
	13F16A0236	CDC-42563-JX1A	23F16E1198	71F16H2161	71F16G0247	13F15H0325			
	13F16L0071		23F16B0027	71F16K0048	71F16G1342	13F15K0142			
	13F16M0048	CDC-43041-JX1A	23F16D0282	71F17A1916	71F16H1114	13F15M0107			
CDA-44041-HPK1A	23F16H0311	CH-24701-H	71F16D0112	DE-14955S-AGK	71F16L1515	DE-25000-KBR	71F16H2137	EU-05041-HPMSB	13F16B0076
	23F16L0434		71F16E0899	71F16D0091	71F16D0091		71F16J0723	13F16H0352	
	23F17B0138		71F16F0720	71F16D1189	71F16J1275		13F17B0098		
CDA-44052-HPK1A	23F16H0967	CH-24701-KM	71F16H0301	DE-15703S-AGK	71F16E0124	EU-05052-HPMSB	71F16J1979	13F15H0234	
	23F16L0317		71F16J2385		71F16E1080		71F16K0749	13F15J0052	
CDA-45041-HPK1A	23F16L0735	CH-25855-KM	71F16L0213	DE-15703S-AGK	71F16F0848	EU-05052-HPMSB	71F16K2001	13F16B0077	
	23F16H0443		71F17B1780		71F16G0225		71F16L0305	13F16C0156	
CDA-45052-HPK1A	23F16L0435	CH-25855-KM	71F16D1338	DE-15703S-AGK	71F16H1239	EU-05052-HPMSB	71F16M1117	13F16E0036	
	23F16H0966		71F16J1783		71F16H1541		71F17A0658	13F16E0169	
CDA-45063-HPK1A	23F16L0736	CH-25855-KM	71F16D1339	DE-15703S-AGK	71F16J0546	EU-05052-HPMSB	71F17A2580	13F16J0124	
	23F16M0332		71F16B0816		71F16J1025		71F17B0587	13F17B0123	
CDA-45541-HPK1A	23F16L0737	CH-25855-KM	71F16B1418	DE-15703S-AGK	71F16J2275	EU-05541-HPMSB	71F17B1195	23S15D1420	
CDA-45552-HPK1A	23F16M0042		71F16B2174		71F16K0787		71F17C0469	13F16B0045	
CDA-45703-P1A	13F15H0256	CH-45703-H	71F16D0363	DE-15703S-AGK	71F16L0059	EU-24041-HPMSB	71F17C1282	71F15K0499	
	13F15K0005		71F16E0558		71F16M0883		71F16B0705	71F15K1002	
	13F15L0131		71F16E0648		71F17A0702		71F16C0532	71F15K1644	
	13F16A0087		71F16H0747		71F17A0816		71F16D0256	71F16B1497	
CDA-45703-P1A	13F16A0176	CH-45854-H	71F16H1192	DE-17702-BGH	71F17B2249	DE-25000-KVI	71F16D1688	71F16C0604	
	13F16A0255		71F16H2210		71F17C0503		71F16H0629	71F16C0861	
	13F16B0144		71F16M0998		71F16B1813		71F16H2080	71F16D0378	
	13F16C0009		71F17A0840		71F16C0530		71F16J0318	71F16E0247	
	13F16C0193	CH-45854-H	71F17A1802	DE-17702-BGH	71F16H2118	DE-25703S-AG1	71F16M0923	71F16E1185	
	13F16D0189		71F16C0629		71F16L2072		71F17A0635	71F16E1853	
	13F16G0238		71F16E0832		71F17C0891		71F16C1436	71F16F1940	
	13F16H0082		71F16F0387		71F16C1773		71F16D0139	71F16G1341	

Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	Product Code	Lot/Batch	
EU-24041-HPMSB	71F16J0267	EU-25541-HPMSB	71F16E1176	IB-12853-GUC	71F16K1968	UK-00420-MID	71F15K0912	UK-05041-THT	71F16E1181	
	71F16J0774		71F16H1316		71F16M1228		71F15K1645		71F16H1320	
	71F16J1792		71F16J0788		71F17A1678		71F15L1262		71F16K1913	
	71F16L1208		71F16J2222		71F17C1266		71F15M0090		71F17A1012	
	71F16M1409		71F16K0184		71F16B1612		71F16A1175		71F16C0113	
	71F17B0741		71F16K1907		71F16D0830		71F16B1474		71F16C1918	
EU-24052-HPMSB	71F15K1666	EU-25552-HPMSB	71F16E1061	IB-25855-HLP	71F16F0809	UK-00420-MID	71F16C1445	UK-05052-MSB	71F16D1165	
	71F16C0115		71F16J1807		71F16F1114		71F16E1649		71F16E1103	
	71F16C1916		71F16K0229		71F16G0141		71F16F0034		71F16M0466	
	71F16D0960		71F16K0911		71F16J0174		71F16F1925		71F17A1490	
	71F16E0180		71F16K1899		71F16K0992		71F16H0113		71F16B1772	
	71F16E1746		71F17A0769		71F16L1179		71F16J0789		71F16E1360	
	71F16J1440	71F16D0987	71F16M0348	71F16J1791	71F16F1899					
	71F16J1801	EU-25563-HPMSB	71F16F0976	71F17B0146	71F16M1457	UK-05052-RDE1	71F16J1442	71F16J1442	71F16J1442	
	71F16K0231		71F16K0485	71F16B0823	71F17A0308		71F16K0228			
	71F16M1449		71F15L0096	71F16B1427	71F17A0765		71F17A1843			
71F17A0286	71F16A0648		71F16C2021	71F17B0751	71F16B2341					
EU-24063-HPMSB	71F16B1161	IB-45703-HRH	71F16B0821	UK-04041-RDE1	71F16E0483	UK-04041-RDE1	71F17C0194	UK-05063-MSB	71F16E0906	
	71F16D0988		71F16B1424		71F16E0659		71F15L0264		71F16K0487	
	71F16K0482		71F16B2176		71F16H0746		71F16B0712		71F16K1894	
EU-25041-HPMSB	71F15K0924	EU-45703-MSB	71F16C2028	IB-45854-GUQ	71F16M1006	UK-04041-THT	71F16B1840	UK-22855-MSB	71F16M0384	
	71F15K1643		71F16E0494		71F17A1804		71F16D0236		71F16D0168	
	71F16B1500		71F16F0432		71F17C1259		71F16E1174		71F16E0204	
	71F16C1116		71F16H0749		71F16C0243		71F16J2347		71F16F0610	
	71F16E0245		71F16H2205		71F16C1303		71F16L1737		71F16F1549	
	71F16E1184		71F16J2251		71F16E0831		71F17A1491		71F16K1645	
	71F16F1825	71F16M1003	71F16F0382	71F15K1667	71F16M0996					
	71F16G0712	71F17A0841	71F16F1553	71F16E1173	71F17A2333					
	71F16H1314	71F17A1810	71F16G1296	71F16L1740	71F16B1948					
	71F16J0782	71F17B0923	71F16J1428	71F17A1011	71F16D1703					
	71F16J1793	EU-45854-MSB	71F16C0241	UK-04052-RDE1	71F16L0177	UK-25000-MSB	71F16D0952	71F16G1037		
	71F16J2214		71F16C1305		71F16L0513		71F16E0909	71F16G1343		
	71F16J2215		71F16E0830		71F17B0428		71F16J1805	71F16J0336		
	71F16M0197		71F16F0390		71F17B0429		71F16L2081	71F16K1287		
71F17B0891	71F16L0174		71F16C2180		71F15K0928		71F16L0139			
71F15K0927	EU-47702-MSB		71F15L1715		IB-47702-HRH		71F16F0821	UK-05041-MSB	71F15K1646	71F16L1083
71F15K1655			71F16A1118				71F16G1297		71F16B1959	71F16L2107
71F16B1775			71F16C2177				71F16K0071		71F16C1944	71F16M1465
71F16C0110		71F16F0825	71F17A1498	71F16E1187		71F17A0854				
71F16C1913		71F16K1979	71F17A1499	71F16G1034		71F17B0823				
71F16D0950		71F16L1673	71F16L1848	71F16J0265		71F17C0050				
71F16E0179	GR-22122-FMSB	71F17A1503	IE-42854-MRC	71F16C1544	UK-25004-ANHS	71F16J0771	71F16C1748			
71F16E1398		71F17A1813		71F16D0603		71F16M0195	71F16E1175			
71F16F1828		71F16D0868		71F16E1059		71F17B0893	71F16F0721			
71F16J1437		71F16F0979		71F16F1904		71F16C0982	71F16G0428			
71F16J1803		71F16L2179		71F16J1482		71F16E0248	71F16C1862			
71F16K0916		71F16D0419		71F16K1269		71F16E1180	71F16D0984			
71F16K1898		71F16H0188		71F16L1407		71F16F0709	71F16F0719			
71F16L1198		71F16L0797		71F16M0433		71F16J0779	71F16F2061			
71F16M1428		GR-25122-UFMSB		71F16J1478		71F16J2348	71F16C1749			
71F17A0305		GR-45703-MSB		71F16M1005		71F16K1866	71F16F0717			
71F17A1833	GR-47702-MSB	71F16K1438	71F16L0325	UK-25006-ANHS	71F16M0349					
EU-25063-HPMSB	IB-12853-GUC	71F16E0018	71F17C0471		71F16L1202	71F16B1882				
		71F16E1688	71F17A2348		71F16M0383	71F16D1012				
		71F16F1423	71F16B0415		71F17A0073	71F16E1655				
EU-25541-HPMSB	IB-12853-GUC	71F16G0387	71F17A0560		71F17A1495	71F16F0487				
		71F16H0934	71F17A1445		71F17C0293	71F16G1298				
		71F16J2232	71F17C0039		UK-05041-THT	71F15K1648	71F16G1441			
									71F16K1890	
									71F16K2076	
									71F16L1064	
									71F16L2166	
									71F17B1274	