



Avis urgent de sécurité sur site

Nom commercial du produit concerné: ECHOGRAPHE SONIMAGE HS1

Identifiant FSCA : FSCA_KM20171212

Type d'action : modification du dispositif

Date: 13-12-2017

Attention: des utilisateurs du SONIMAGE HS1

Détail du dispositif concerné:

Nom du modèle: ECHOGRAPHE SONIMAGE HS1

Numéro de série: Tous les dispositifs mis sur le marché sont concernés

Description du problème:

Il a été constaté que si le connecteur entre le boîtier d'adaptation électrique et le câble d'alimentation subit de fortes pressions ou torsions répétées, la carte du boîtier d'adaptation peut s'endommager et peut provoquer un dégagement de fume dans des cas très rare. Le risque pour la sécurité est extrêmement faible car le boîtier d'adaptation est conçu avec des matériaux ignifugés.

Actions correctives:

- 1) Informer l'ensemble des utilisateurs de SONIMAGE HS1.
- 2) Remplacer tous les boîtiers d'adaptation électrique installés par un nouveau système.

Mesures à prendre par les utilisateurs:

- Merci de bien vouloir ne pas exercer de forte pressions ou torsions sur le connecteur entre le boîtier d'adaptation électrique et le câble d'alimentation.
- Votre distributeur va vous informer de la date du remplacement.

Transmission de cet avis de sécurité sur site:

Cet avis doit être transmis à toutes personnes concernées dans votre organisation ou toutes organisations potentiellement concernées par ce dispositif.

Merci de bien vouloir faire suivre cet avis à toutes organisations concernées.

Merci de suivre l'évolution de cet avis et de mettre en place les actions appropriées pendant la période nécessaire pour assurer l'efficacité de cette action corrective.

Contact référent:

Nom: Patrick Callens

Société: Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Adresse: Hoogoorddreef 9, 1101 BA Amsterdam, PAYS-BAS

Le signataire confirme que cet avis a été notifié l'Agence de Régulation appropriée.

Signature