

Madame, Monsieur,

Nous vous informons par la présente qu'une réparation des dispositifs médicaux LikoGuard™ L (3301030) et LikoGuard™ XL (3301040) va être réalisée. Vous recevez cette lettre car, selon nos données, vous êtes un utilisateur potentiel de ces produits.

Si vous avez des questions sur cet avis, veuillez contacter le service d'assistance technique Hill-Rom, votre distributeur ou votre représentant Hill-Rom.

Nous vous remercions d'avance de l'attention que vous porterez à cet avis.

Cordialement,

Assistance technique Hill-Rom



---

## Avis concernant un dispositif médical

**Objet :** Risque de dysfonctionnement de la fonction d'abaissement de secours des lève-personnes plafonniers LikoGuard™ L et XL

**N° d'identification FSCA :** MOD1274

**Type d'action :** Réparation du dispositif

---

**Date :**

**Destinataires :** Directeur général, administrateur de l'établissement, ingénieur de l'établissement, directeur de la vigilance, ingénierie biomédicale et officier de liaison des dispositifs médicaux

**Dispositifs concernés :** LikoGuard™ L (3301030), LikoGuard™ XL (3301040)

**Numéros de série :** LikoGuard™ L 2200001 – 2200614  
LikoGuard™ XL 2300001 – 2300070

### Description :

Hill-Rom a pris connaissance d'un problème qui pourrait affecter le fonctionnement de la fonction d'abaissement de secours mécanique des lève-personnes plafonniers LikoGuard™ L et LikoGuard™ XL. Avec le temps, un composant en plastique situé à l'intérieur des lève-personnes peut se déformer et rendre la fonction d'abaissement de secours mécanique presque inopérante. Cette fonction s'utilise uniquement pour abaisser les patients en cas de coupure d'alimentation et ne constitue qu'un mécanisme de secours.

Hill-Rom a étudié le problème et déterminé que bien que le lève-personne reste sûr à utiliser, une mesure corrective est justifiée pour que les appareils deviennent conformes aux normes. Aucun problème ni aucune allégation de dommages corporels pour le patient n'ont été signalés pendant l'utilisation des dispositifs.

### Mesure à prendre par l'utilisateur :

Veillez transférer comme il se doit cet avis aux autres établissements. Prenez bonne note de cet avis aussi longtemps que nécessaire afin de garantir son efficacité.

### Mesure à prendre par Hill-Rom :

Un technicien de maintenance ou une personne désignée contactera votre établissement afin de coordonner l'inspection et de procéder à la réparation de votre dispositif.

### Personne-ressource :

Si vous avez des questions concernant la réparation de ce dispositif, veuillez contacter le service d'assistance technique Hill-Rom, votre distributeur ou votre représentant Hill-Rom.

Hill-Rom confirme que les autorités de réglementation compétentes ont été informées de cet avis concernant un dispositif médical.

Cordialement,

Assistance technique Hill-Rom