

Cher client FreeStyle,

Une nouvelle fonction a été ajoutée au logiciel de ce lecteur FreeStyle pour éviter tout risque d'interprétation erronée des résultats de glycémie.

Lors de modifications des paramètres du lecteur tels que la date et l'heure, il était possible de changer par inadvertance l'unité de mesure, ce qui pouvait avoir pour conséquence une interprétation erronée des résultats de glycémie. Pour éviter de telles erreurs, l'unité de mesure de votre lecteur FreeStyle a été paramétrée en mg/dL ou mmol/L. Elle ne peut donc plus être changée.

Cette nouvelle fonction est une mise à jour apportée à votre lecteur FreeStyle, les indications de la section « Réglage de l'unité de mesure » de votre manuel d'utilisation ne sont plus valables.

Les unités de mesure standard sont énumérées ci-dessous par pays. Pour vérifier l'unité de mesure de votre lecteur FreeStyle, passez en mode Mémoire du Lecteur. L'unité de mesure s'affichera à l'écran.

Pour toute question, veuillez contacter notre Service Clientèle.

Cordialement,

Abbott Diabetes Care  
Produits FreeStyle

---