

Dardilly, le 20 Juillet 2007

A l'attention : - des responsables de laboratoire
- des directeurs des établissements de santé
- des correspondants locaux de réactovigilance

Objet :

Retrait du latex Wellcogen *Neisseria meningitidis B/E.coli K1* lot P798010 contenu dans les coffrets:

- **Wellcogen Coffret d' antigènes bactériens R30859602 lots P921420 et P920810**
- **Wellcogen *Neisseria meningitidis B/E.coli K1* R30859502 lots P917910 et P917920**

Madame, Monsieur,

Des investigations menées suite à des remontées d'information de clients ont confirmé la survenue d'un faible nombre de réactions faussement positives sur le liquide céphalo-rachidien néonatal avec le latex Wellcogen *Neisseria meningitidis B/E.coli K1* lot n° P798010 contenu dans les coffrets dont les numéros figurent dans le cadre ci-dessus.

Par mesure de précaution et en accord avec l'AFSSAPS , si vous avez encore en votre possession le réactif incriminé, nous vous demandons :

de ne plus utiliser le latex Wellcogen *N meningitidis B/E. coli K1* lot P798010, ce qui signifie :

- Retirer et détruire ce flacon de latex du Wellcogen Coffret d'antigènes bactériens R30859602 lots P921420 et P920810 (les autres réactifs de ce coffret complet d'antigènes bactériens peuvent eux, être utilisés de façon habituelle)
- Détruire les coffrets de Wellcogen *N. meningitidis B/E coli K1* R30859502 lots P917910 et P917920

Merci de nous retourner le certificat de destruction joint, par fax au 04 78 66 03 76. A réception nous procéderons à l'échange par des lots non concernés par cette anomalie.

Notre assistance technique est à votre disposition si nécessaire au 04 72 52 33 73.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

MF MARQUET
Chef de produits