


1/2-

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

Système de tomodensitométrie à rayons X Philips Incisive

Espace important entre le plan d'examen et le capot de la table d'examen

Systèmes concernés	Système de tomodensitométrie à rayons X Philips Incisive
Description du problème	Il se peut que l'espace entre le plan d'examen et le capot de la table d'examen soit suffisamment large pour coincer une ligne de perfusion ou les vêtements amples d'un patient entre les parties fixe et mobile de la table lors de sa sortie du statif.
Risques liés au problème	Ce problème peut entraîner les situations dangereuses suivantes : 1- La ligne de perfusion est bloquée à l'avant de la table d'examen lors de sa sortie du statif. L'aiguille du patient risque d'être arrachée, entraînant ainsi des blessures. 2- Les vêtements amples du patient sont coincés à l'avant de la table d'examen lors de sa sortie du statif. Les vêtements se resserrent, ce qui peut entraîner un risque de pincement de la peau ou de fracture.
Identification des systèmes concernés	Le scanner Philips Incisif portant le numéro de produit 728143 est affecté.  <p>PHILIPS Incisive CT CT SCANNER SYSTEM</p> <p>MODEL: Incisive CT REF: 728143 VOLT: 3N~380V/400V FREQ: 50/60Hz POWER: 115kVA (01)00884838085015 CLASSIFICATION: CLASS I TYPE B (21)500002</p> <p>MODE OF OPERATION: CONTINUOUS OPERATION WITH INTERMITTENT LOADING</p> <p>Philips Healthcare(Suzhou)Co.,Ltd. NO.258, ZhongYuan Road, Suzhou Industrial Park,215024, Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA</p> <p>SN [] []</p>
Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur	Philips recommande aux opérateurs de veiller à ce que la ligne de perfusion ou les vêtements du patient ne soient pas coincés lors du déplacement du patient hors du statif. Contactez votre ingénieur commercial Philips pour toute question ou demande d'assistance concernant ce problème.

2/2-

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical*Système de tomodensitométrie à rayons X Philips Incisive**Espace important entre le plan d'examen et le capot de la table d'examen*

Actions menées par Philips France Commercial	L'action corrective (FCO) 72800714 est émise pour remplacer le matelas de la table d'examen par un matelas plus large afin d'éviter l'apparition d'un espace important. Un responsable technique Philips vous contactera afin de planifier une action sur site pour votre système.
Informations complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole. Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips