

Numéro Client : «F4»

«F5»
«F6»
«F7»
«F8» «F9»
«F3»

Le Longeron, le 10 Septembre 2019

Objet : Information de sécurité concernant le SECURIDRAP® SELFIA®

Chers clients,

Dans le cadre de sa politique de prévention et de surveillance continue, le Groupe Mulliez-Flory souhaite informer ses clients sur les règles applicables pour tout SECURIDRAP® SELFIA® présentant un défaut ou une altération.

Afin d'éviter tout incident lié à l'utilisation d'un produit présentant un défaut ou une altération, le Groupe Mulliez-Flory rappelle au travers de ce courrier le comportement devant être adopté :

- Avant chaque utilisation du SÉCURIDRAP® SELFIA® il est indispensable de vérifier le bon état du SÉCURIDRAP® SELFIA® (aspect tissu, coutures, sangles, maintien pelvien, fermetures éclair)
- **En cas de défaut ou d'altération, le SÉCURIDRAP® SELFIA® ne peut être utilisé. Dans cette situation, le Service Après-Vente doit être contacté pour décider des suites à donner.**

Afin de garantir la sécurité des patients, il est formellement interdit de réparer ou modifier le SÉCURIDRAP® SELFIA®.



Exemples de défaut pouvant être rencontré :

- Bouton manquant, décousu au niveau du maintien pelvien
- Maintien pelvien déchiré
- Sangle abîmée ou décousue
- Marquage de sécurité décollé
- Fermeture cassée
- Boucles décousues au niveau des glissières de la fermeture
- Drap déchiré
- Encolure déchirée

La société Mulliez-Flory joint en annexe de la présente la notice d'utilisation modifiée qui reprend l'ensemble de ces recommandations.

Nous vous rappelons également que la vidéo de démonstration du SECURIDRAP® SELFIA® est consultable via le lien suivant : <https://www.mulliez-flory.fr/les-produits/le-securidrap-selfia/>

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente et restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Nous vous prions de croire, chers clients, en l'assurance de notre parfaite considération,

