

**Aux clients et utilisateurs des
circuits de ventilation chauffés Dräger**

Mai 2020

Consigne importante de sécurité !!!

Combinaison de circuits de ventilation avec des humidificateurs

Produits concernés :

Seuls les circuits de ventilation chauffés Dräger sont concernés

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de notre surveillance mondiale des produits, Dräger a eu connaissance d'un incident au cours duquel un circuit de ventilation VentStar Helix chauffé a été utilisé avec un humidificateur Fisher & Paykel MR810. La combinaison de ces deux produits n'est pas approuvée. L'humidificateur utilisé n'a pas détecté de dommage inexplicable sur le fil chauffant du VentStar Helix chauffé auparavant. Il en a résulté une inflammation du gaz respiratoire et le patient concerné a subi des brûlures.

Si les circuits de ventilation chauffés Dräger sont utilisés avec d'autres humidificateurs que l'humidificateur Fisher & Paykel MR850 mentionné dans notre notice d'utilisation, les patients et/ou les utilisateurs peuvent être blessés en cas de défaut.

L'humidificateur MR850 de Fisher & Paykel possède des fonctions de contrôle qui, en cas de défaut tel que celui décrit ci-dessus, interrompraient l'alimentation électrique en générant une alarme.

Assurez-vous que vous utilisez tous les circuits de ventilation chauffés Dräger uniquement en combinaison avec l'humidificateur Fisher & Paykel MR850 spécifié dans la notice d'utilisation.

Veillez transmettre l'information à tous les utilisateurs concernés dans votre établissement.

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Allemagne
Adresse postale :
23542 Lübeck, Allemagne
Tél. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
N° de TVA DE135082211

Coordonnées bancaires :
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN : DE95 2304 0022 0014 6795
00 Code SWIFT : COBA DE FF 230
Sparkasse zu Lübeck
IBAN : DE15 2305 0101 0001 0711
17
Code SWIFT : NOLADE21SPL

Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7903 HL
Commandité : Drägerwerk Verwaltungs AG
Siège de la société : Lübeck
Registre du commerce :
Tribunal d'instance Lübeck HRB 7395 HL

Président du conseil de surveillance
Pour Drägerwerk AG & Co. KGaA et
Drägerwerk Verwaltungs AG :
Stefan Lauer
Direction :
Stefan Dräger (Président)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr Reiner Piske
Anton Schrofner

Page 2 / 2

Nous regrettons les désagréments occasionnés par cette note d'information, mais nous considérons qu'il s'agit d'une mesure préventive indispensable pour accroître la sécurité des patients.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Salutations distinguées

Markus Kämer
Senior Product Manager
BU Hospital Consumables & Accessories
Drägerwerk AG & Co. KGaA

Oliver Möller
Deputy Safety Officer for Medical Devices
Post Market Surveillance
Drägerwerk AG & Co. KGaA