

Direction Qualité

**Centre Hospitalier
Directeur
Correspondant Matéiovigilance
Responsable de Bloc Orthopédique**

DGE/FLA
Boulogne, 10 avril 2009

**Objet : Rappel de lot 51544817 Viseur Targon PF (TARGON PF AIMING BOW)
(Ref : KH357R)**

Madame, Monsieur,

Suite à des remontées de clients, nous avons détecté des défauts au niveau du trou de connexion guide/clou du lot 51544817.

Nous procédons, en accord avec l'AFSSAPS, au rappel du lot 51544817 Viseur Targon PF (TARGON PF AIMING BOW) (Ref : KH357R).

En effet, il n'est pas possible d'insérer la vis de connexion du clou Targon PF (Targon PF Nail Adapter Screw ref : KH443R) dans le trou du viseur (KH357R). La fixation du clou Targon ne peut donc pas être réalisée.

Le numéro de lot du viseur étant mentionné sur l'emballage et pas sur le viseur, nous vous demandons de vérifier sans délai tous les viseurs Targon PF (Targon PF Aiming B KH357R) en votre possession pour éviter toute interruption de la procédure chirurgicale.

Après vérification, nous vous demandons de nous retourner le document joint attestant de la vérification. Si vous détectez des pièces défectueuses, merci de prendre contact avec notre service Les Relations Qualité : 01.41.10.53.29.

Le produit défectueux sera remplacé dans les meilleurs délais.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

**Didier GERBAUD
Directeur Qualité & Affaires Réglementaires**

TELECOPIE

EXPEDITEUR : DESTINATAIRE :

B. Braun Medical SAS
Direction Qualité & Affaires Réglementaires

204, Avenue du Maréchal Juin - BP 331
F - 92107 BOULOGNE Cedex

Tel – 01.41.10.53.29
Fax – 01.4110.52.86

Fax - N°.

Pages (celle-ci incluse) : 1

Objet : RAPPEL DE LOTS : Viseur Targon PF (KH357 R)

Je soussigné

De l'Etablissement

Certifie avoir vérifié les produits en stocks :

Nous avons trouvé :

des produits défectueux

Nombre de produits

Aucun produit défectueux

Date :

Signature & Cachet de l'Etablissement :