

Rungis le 07 mai 2009

INFORMATION PRODUIT – Correction Produit


Produits	Référence
Batterie rechargeable Imprimante Martel	6F2135

Madame, Monsieur,

Abbott Point of Care a constaté que certaines batteries rechargeables pour imprimantes Martel distribuées fin 2008 et en 2009, utilisées avec le matériel i-Stat1, pouvaient surchauffer et entraîner des défaillances de l'imprimante.

Les batteries rechargeables défaillantes peuvent être distinguées des batteries rechargeables opérationnelles par leur couleur.

Les batteries rechargeables défaillantes sont de couleur «vert clair», et les batteries rechargeables opérationnelles sont de couleur «vert foncé», (cf photo ci-dessous).

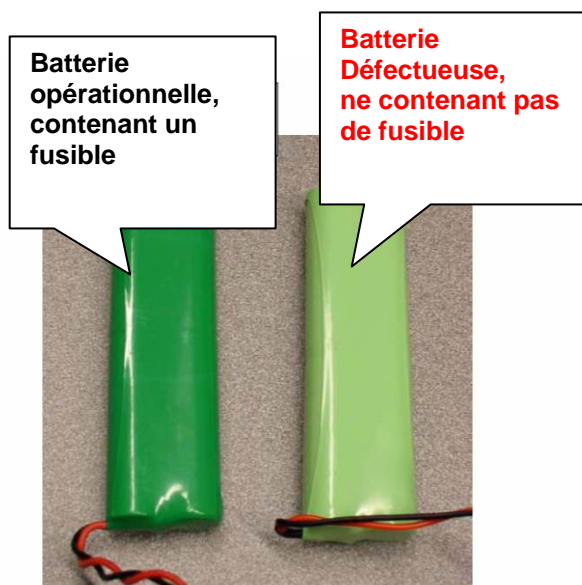

MESURES RECOMMANDEES

- Vérifiez la couleur de la batterie rechargeable présente dans votre imprimante Martel.
- Si la batterie est de couleur «vert foncé», à gauche sur la photo, aucune action n'est requise.
- Si la batterie est de couleur «vert clair», à droite sur la photo, veuillez contacter votre représentant Abbott Point of Care afin qu'il vous fasse parvenir une nouvelle batterie. Par mesures de précaution, veuillez SVP ne plus utiliser l'imprimante ayant des batteries défectueuses.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour toute question concernant cette information, vous pouvez contacter votre représentant Abbott Point of Care.

Nous vous remercions de votre confiance et de l'attention que vous voudrez bien porter à ce courrier et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Béatrice Thiébaud
Adjointe au Responsable de l'Assurance Qualité Abbott Diagnostics
Abbott Diagnostics pour Abbott Point Of Care

APOC03SEP2008

i-STAT est une marque déposée d'Abbott Laboratories.