

Décembre 2020

Cher patient/Chère patiente,

Ce message a pour but de vous informer des éventuels comportements de certains systèmes de défibrillateur cardiaque implantable sous-cutané (S-ICD) EMBLEM™ de Boston Scientific. Un système S-ICD est composé d'un dispositif S-ICD (implanté sur le côté gauche de la poitrine) et d'une électrode (implantée sous la peau, au niveau de la poitrine). Nous avons pris contact avec votre cardiologue pour lui donner des informations sur ces éventuels comportements; les copies des courriers décrivant ces comportements sont également disponibles sur www.BostonScientific.com/advisory. Votre médecin sera en mesure de vous donner de plus amples informations sur votre prise en charge en tenant compte de vos besoins en matière de santé.

Pour déterminer si votre S-ICD ou votre électrode fait partie des produits concernés, veuillez consulter la page www.BostonScientific.com/lookup. Vous devrez indiquer votre langue, ainsi que le modèle et les numéros de série de votre dispositif et de votre électrode ; ces deux informations se trouvent sur votre carte d'identification de patient.

Quelle est la procédure à suivre ?

- Continuez d'assister à tous vos rendez-vous prévus pour les contrôles du dispositif avec votre médecin.
- Demandez à votre médecin de vous indiquer les meilleures pratiques à adopter pour vivre avec votre système S-ICD.
- Lors de la consultation, demandez à votre médecin, infirmière ou technicien d'activer le bipteur de votre dispositif pour que vous puissiez identifier le son.
- Si votre système S-ICD prend en charge cette fonctionnalité, discutez avec votre médecin de la possibilité de surveillance à distance à l'aide d'un système de suivi à domicile LATITUDE™ :
 - Si vous ne disposez pas d'un système de suivi à domicile, demandez à votre médecin si cette option peut être envisageable pour vous.
 - Si vous disposez d'un système de suivi à domicile et que le bouton blanc en forme de cœur clignote, appuyez dessus lorsque vous vous trouvez à côté de ce dernier. Des informations seront alors automatiquement envoyées depuis votre dispositif directement à votre médecin.
- Contactez immédiatement votre médecin si votre dispositif :
 - émet des bips, auquel cas vous devez faire vérifier votre dispositif le plus rapidement possible ;
 - vous a administré un choc ; ou
 - ne se connecte pas à votre système de suivi à domicile LATITUDE (indiqué par des voyants de réception jaunes à gauche du bouton en forme de cœur).

Chez Boston Scientific, la sécurité du patient est au cœur de nos priorités. Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration avec vous et votre médecin pour trouver une solution à ces éventuels comportements du dispositif. Nous vous recommandons de discuter de ce courrier avec votre médecin. Il est le plus à même de savoir en quoi ces nouvelles informations peuvent vous concerner.

Alexandra Naughton
Vice-présidente, Assurance qualité

Kenneth Stein, MD, FACC, FHRS
Premier vice-président et médecin en chef, RM