


URGENT- PROCEDURE DE SECURITE

Nom du produit: Lève-personne sur rail Luna
(tous les numéros de série)
Identifiant FSCA: 13.07.2009
Type d'action: Dispositif de correction
Concerne: Tous les revendeurs, clients et utilisateurs
du système de levée Luna

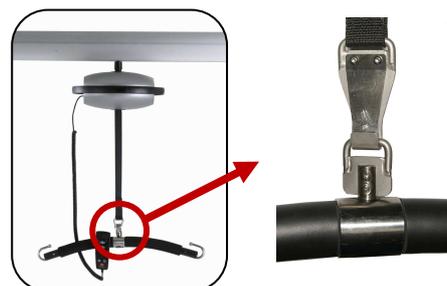

Dispositif concerné

Cintre avec anneau pour sangle que l'on attache au système de levée par un crochet – voir le cercle rouge dans la photo.

Description du problème

Nous avons constaté que le crochet de connexion pouvait devenir dangereux s'il était mal utilisé. Ce dysfonctionnement apparaît quand le cintre est attaché à la barre entourant le capot du Luna par un de ses crochets d'extrémité ou si le cintre est mis dans une position très particulière. L'anneau de connexion du cintre a été redessiné afin que cette situation ne puisse plus se reproduire. Ergolet a développé un système simple qui peut être adapté facilement sur les cintres existants et qui assure une sécurité totale.

Action

En accord avec l'Afssaps, ce système sera installé sur l'ensemble des dispositifs. Votre revendeur local Sclessin va prendre contact avec vous pour organiser la mise à jour de vos dispositifs. Dans l'attente de la modification, veuillez vérifier la bonne position du crochet de connexion avant d'utiliser le Luna :



correct



incorrect

Cette note ne s'applique pas au cintre ayant une connexion par baïonnette.

Transmission de cette procédure de sécurité

Veuillez vous assurer que cette procédure soit transmise à toutes les personnes concernées. Si le moteur Luna n'est pas en votre possession, veuillez transmettre cette procédure à l'utilisateur habituel. Tous les importateurs et revendeurs Ergolet ont pour instruction de contacter tous les utilisateurs de cintre avec crochet de connexion, de leur transmettre ce courrier et de s'assurer de la mise en œuvre de l'action corrective.

Personne à contacter

Joe Evans

Ergolet A/S,

Taarnborgvej 12C

4220 Korsør, Danemark

e-mail: joe@ergolet.dk

Tel.: +45 58 37 37 20

Fax: +45 58 37 31 72