

INFORMATION PRODUIT – Correction Produit

Produit	Référence	Numéro de série
Imprimante MARTEL i-STAT 1	6F23-91	De 20091081 à 24124897

26 Novembre 2009

Madame, Monsieur,

Cette Information Produit contient une information importante concernant l'imprimante MARTEL utilisée avec les instruments i-STAT 1.

Situation

Les laboratoires Abbott ont déterminé que certaines imprimantes Martel utilisées avec les instruments i-STAT 1 possèdent des batteries rechargeables sans fusible de sécurité. Des investigations ont montré que ce type de batteries est susceptible de provoquer une surchauffe importante, avec le risque que l'imprimante prenne feu.

Mesures requises

Les imprimantes Martel avec une trappe d'accès aux batteries, dont le numéro de série est supérieur ou égal à 250765184, ne sont pas concernées par cette notification technique (voir la photo au verso de ce courrier).

Si vous êtes en possession d'une imprimante Martel dont le numéro de série est compris **entre 20091081 et 241248976**, ce modèle **ne possède pas de trappe d'accès** aux batteries rechargeables (voir la photo au verso de ce courrier).

Nous vous demandons alors **d'arrêter d'utiliser votre imprimante** et de **prendre contact avec notre Assistance Téléphonique** afin de procéder à un retour pour échange.

Si vous avez transmis une imprimante à d'autres établissements, veuillez les informer de cette mesure et leur transmettre une copie de cette lettre.
Veuillez conserver ce courrier dans votre documentation.

Informations complémentaires

Notre service Abbott Assistance se tient à votre disposition au **01 45 60 25 50**.

L'Assaps a été informée de cette communication.

Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions d'agréer l'expression de notre sincère considération.

Joëlle GONCALVES
Adjointe au Responsable Qualité
Abbott Diagnostics

