

**Cabinet d'anatomie pathologique
53, rue Jeanne d'ARC
80000 AMIENS**

À l'attention de l'équipe technique

| |
|--|
| Annexe 2 : Mesures correctives concernant les microtomes HM340E et HM355S |
|--|

Francheville, le 1^{er} février 2010

Madame, Monsieur,

Vous avez acquis un microtome MICROM HM 340^E (N° de série 44782) :

MICROM International (Groupe Thermo Fisher Scientific) nous a adressé un courrier pour effectuer le **rappel du pupitre de commande des microtomes HM340E** (Numéros de série 44481 à 46577) et **HM355 S** (Numéros de série 44478 à 46628). En effet de temps à autre *le porte échantillon peut avancer seul à une très faible vitesse pouvant heurter le support de lames jetables (il n'y a pas de risque pour l'utilisateur, l'avance étant très lente celle-ci peut être arrêtée très facilement en tournant en sens inverse le bouton d'avance)*.

De ce fait vous allez recevoir un nouveau pupitre que vous pourrez changer par vous même ou, si vous préférez, votre I.T.C régional pourra effectuer ce changement. Votre ancien pupitre sera récupéré pour retour à l'usine de fabrication.

Nous vous en souhaitons bonne réception. Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

A. MARDUEL