

Zimmer France

BP 81034
F – 25461 ETUPES Cedex
Téléphone +33 (0)3 81 99 43 00
Fax +33 (0)3 81 99 43 40
www.zimmer.com

De : Zimmer France
Téléphone : 03 81 99 43 00
Date : 05 mai 2010

Destinataire
Service Pharmacie
Correspondant Matérovigilance

**Objet : COMPLEMENT D'INFORMATION SUITE AU RAPPEL des têtes A jupe Inox
HTA Cône 8/10 et têtes A jupe Inox Cône 12/14 datant du 29 Mars 2010.**

**A l'attention des établissements ayant des patients implantés avec les références et lots
suivants :**

Nom du produit	Référence / numéro de lot
Tete A Jupe Inox HTA Cone 8/10 D 28/0	15.12.28.05 / 4014359
Tete A Jupe Acier Inox Cone 12/14 D 28/-4	15.12.28.05 / 4014646
Tete A Jupe Acier Inox Cone 12/14 D 28/0	15.12.28.06 / 4014334
Tete A Jupe Acier Inox Cone 12/14 D 28/+4	15.12.28.07 / 4014445
	15.06.28.06 / 4014352
	15.06.28.06 / 4014570
	15.06.28.06 / 4014691

Madame, Monsieur, Cher Client,

Vous avez été identifiés comme ayant probablement implanté les dispositifs cités ci-dessus.

Nous vous informons, que suite aux écarts dimensionnels possibles de ces dispositifs (objet du rappel), certains cônes ne permettent pas la rotation de la tête dans la cupule mobile. Cette anomalie peut être décelable en cas d'essai préalable avant la pose sur patient.

Cependant, si l'anomalie n'est pas détectée, le blocage de la tête métallique dans la cupule mobile peut entraîner, directement ou dans un délai court, un fonctionnement de type prothèse unipolaire avec ses risques propres.

Nous suggérons dans ce cas une surveillance adaptée des patients concernés.

Vous remerciant par avance pour votre compréhension,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, Cher Client, l'expression de nos sentiments distingués.

Pierre MOLLIER
Chef de groupe hanche

Nathalie ZIMMER
Responsable Qualité /affaires réglementaires