

**Avis de sécurité urgent**

Distribution client

**Date d'émission : 26 janvier 2011****Informations sur les dispositifs concernés :**

Nom du produit :	Numéro d'article :	Numéro du kit/lot :	Date de fabrication :	Date d'expiration :
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	PK682	10/11/2004	11/2005
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	RK0514	04/08/2005	07/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	RK0679	01/10/2005	12/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	RK0730	21/10/2005	07/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0142	15/02/2006	02/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0315	19/04/2006	04/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0349	24/04/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0363	05/05/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0781	04/12/2006	10/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	TK0848	19/12/2006	01/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK047401	22/08/2007	31/08/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK047406	19/06/2008	31/12/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK047407	19/06/2008	31/12/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK083600	15/11/2007	28/02/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK083606	19/06/2008	31/12/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK088800	04/12/2007	29/05/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK088806	19/06/2008	31/12/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EK093000	03/01/2008	30/11/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	EKO88800	30/11/2007	31/08/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	FK011500	27/03/2008	30/04/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	FK021700	05/06/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	FK025500	11/06/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	FK033500	30/07/2008	30/09/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	4874244A	13/10/2008	28/02/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	5386544A	16/12/2008	28/02/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	5452894B	06/02/2009	31/05/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	5452904B	03/06/2009	31/10/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	6435904B	15/06/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	6564144B	14/09/2009	31/01/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	6795974B	18/09/2009	28/02/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7033094C	10/11/2009	31/05/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7100394C	18/12/2009	31/05/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7514175A	18/03/2010	30/09/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7748235A	30/04/2010	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7764625B	22/06/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	7800105C	01/07/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	81550	8007765B	25/08/2010	31/01/2012
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0104	15/02/2006	02/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0265	14/03/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0328	24/04/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0472	30/06/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0476	30/06/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0505	12/07/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0583	07/08/2006	08/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0734	09/11/2006	10/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	TK0744	01/11/2006	08/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	FK009700	20/03/2008	31/01/2009

RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	FK015500	16/04/2008	30/04/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	FK019600	05/06/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	FK037100	12/08/2008	31/08/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	4874254A	21/08/2008	30/09/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	5198984A	06/11/2008	30/09/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	5860304B	18/03/2009	31/07/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	7853844C	26/04/2010	31/05/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 500 tests	815500	8566045F	04/10/2010	31/03/2012
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	PK683	10/11/2004	11/2005
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0293	02/02/2005	04/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0326	15/06/2005	04/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0443	25/07/2005	07/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0561	25/08/2005	11/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0633	16/09/2005	11/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0677	01/10/2005	07/2006
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 50 tests	815999	RK0711	18/10/2005	01/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0731	24/10/2005	01/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0732	24/10/2005	02/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	RK0800	13/12/2005	02/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0132	06/02/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0133	24/02/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0214	27/02/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0243	07/03/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0254	13/03/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0362	05/05/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0390	15/05/2006	05/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0437	20/06/2006	07/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0553	25/07/2006	08/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	TK0782	04/12/2006	08/2007
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	EK046006	25/06/2008	31/12/2008
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	EK062206	23/07/2008	14/01/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK005200	20/02/2008	31/01/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK005201	20/03/2008	31/01/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK005202	27/03/2008	31/01/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK005206	23/07/2008	31/05/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK007200	20/03/2008	31/01/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK014200	29/05/2008	31/05/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK014206	28/11/2008	31/08/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK019500	19/06/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	FK052000	27/02/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	4874274A	09/09/2008	30/09/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	4992744A	19/11/2008	28/02/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	5308404B	10/12/2008	30/04/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	5351744A	09/12/2008	28/02/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	5452924B	06/02/2009	31/05/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	5624494B	23/02/2009	31/05/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	5661524B	09/03/2009	31/07/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6136524B	29/04/2009	31/07/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6232994B	22/05/2009	31/07/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6435914B	12/06/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6501004B	17/06/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6652754B	18/09/2009	28/02/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	6795984C	16/10/2009	31/03/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7033104C	31/10/2009	31/03/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7081354C	08/12/2009	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7428534C	18/01/2010	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7460705A	12/03/2010	31/05/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7640455A	26/03/2010	30/09/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7679635A	17/03/2010	30/09/2011

RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7764645B	22/06/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7800135B	22/06/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 1000 tests	815999	7800145B	17/08/2010	31/08/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	FK011200	27/03/2008	31/05/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	FK023800	05/06/2008	31/07/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	FK031000	25/06/2008	31/05/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	5146263E	11/11/2008	31/08/2009
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	5332764A	08/12/2008	28/02/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6136514B	03/06/2009	31/10/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6324524B	03/06/2009	31/05/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6565264B	19/06/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6636034B	10/07/2009	31/08/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6864604B	24/08/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	6885484B	14/09/2009	31/12/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7291314C	13/01/2010	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7472324C	19/01/2010	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7497374B	10/02/2010	28/02/2010
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7497384C	03/02/2010	31/05/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7610685A	15/03/2010	30/09/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7703494C	17/03/2010	31/07/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	7958984C	20/05/2010	31/08/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8074625A	12/06/2010	31/10/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8225315B	25/08/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8342395B	17/08/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8502415B	15/09/2010	30/11/2011
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8533015F	26/09/2010	31/01/2012
RELI SSO HLA-DRB1 Typing Kit 100 tests	815666D	8562695F	27/09/2010	31/03/2012

### **Description du problème :**

Un logiciel non validé à des fins de diagnostic a été utilisé en tant que version principale pour le test de contrôle de la qualité des produits RELI SSO. En attendant une enquête plus approfondie, l'interprétation à l'aide de la méthode d'analyse manuelle a identifié des faux positifs pouvant provoquer de mauvais résultats de typage ou une absence de résultats.

La méthode d'interprétation manuelle a permis d'identifier que la sonde de contrôle de référence de l'intensité ne produit qu'une bande d'intensité très faible. En raison de la faible sonde de contrôle, les sondes suivantes ont été identifiées comme potentiels faux positifs :

**DRB1 Master Mix**

Sondes : 9, 10, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 42, 46, 47, 50, 52, 53

**DRB1\*03/11/13/14 Master Mix**

Sondes : 9, 20, 25, 27, 30, 33, 37, 38, 42, 46, 47, 50

Plusieurs combinaisons de ces faux positifs peuvent produire de mauvais résultats de typage ou une absence de résultats.

Les allèles suivants ont été identifiés comme cause de mauvais résultats de typage :

**DRB1 Master Mix :**

Si la sonde 27 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*08:03:02 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*08:16 et 08:19,08:30:02

DRB1\*08:14,08:36 et 08:16

DRB1\*08:03:02,08:23,08:27,08:33 et 08:16

DRB1\*08:03:02,08:23,08:27,08:33 et 08:07,08:11

DRB1\*08:01:01,08:01:02,08:01:03,08:01:04,08:17,08:26 et 08:19,08:30:02

DRB1\*08:01:01,08:01:02,08:01:03,08:01:04,08:17,08:26 et 08:14,08:36

DRB1\*08:01:01,08:01:02,08:01:03,08:01:04,08:17,08:26 et 08:03:02,08:23,08:27,08:33

Si la sonde 27 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*16:02:01 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*16:01:01,16:03,16:09,16:13N et 16:02:01,16:10,16:11,16:12

Si la sonde 42 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*03:02:01 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*03:02:01,03:29 et 03:02:02,03:27

### **DRB1\*03/11/13/14 Master Mix**

Si la sonde 25 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*01:01:01 et 13:01:01 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*11:16 et 13:68,13:87

DRB1\*11:16 et 13:16,13:28

DRB1\*11:16 et 13:01:01,13:01:02,13:01:03,13:35,13:40,13:51,13:59,13:69,13:79,13:80

Si la sonde 38 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*14:02 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*14:46 et 14:51

DRB1\*14:09,14:30 et 14:51

DRB1\*14:02 et 14:51

Si la sonde 42 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*03:01:01 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*03:24 et 03:42

DRB1\*03:24 et 03:26,03:33,03:36

DRB1\*03:13:02 et 03:48

DRB1\*03:13:02 et 03:45,03:50,03:51

DRB1\*03:13:02 et 03:42

DRB1\*03:13:02 et 03:26,03:33,03:36

DRB1\*03:13:02 et 03:23,03:44,03:52

DRB1\*03:07,03:32,03:39 et 03:13:02

DRB1\*03:01:07,03:13:01 et 03:24

DRB1\*03:01:06 et 03:24

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:48

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:46,03:

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:45,03:50,03:51

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:42

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:26,03:33,03:36

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:23,03:44,03:52

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:07,03:32,03:39

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:01:07,03:13:01

DRB1\*03:01:02,03:11:02 et 03:01:06

DRB1\*03:01:01:01,03:01:01:02,03:01:03,03:01:05,03:01:08,03:06,03:16,03:18,03:19,03:22,03:28,03:37 et 03:24

DRB1\*03:01:01:01,03:01:01:02,03:01:03,03:01:05,03:01:08,03:06,03:16,03:18,03:19,03:22,03:28,03:37 et 03:13:02

DRB1\*03:01:01:01,03:01:01:02,03:01:03,03:01:05,03:01:08,03:06,03:16,03:18,03:19,03:22,03:28,03:37 et 03:01:02,03:11:02

Si la sonde 46 est considérée comme un faux positif par l'interprétation manuelle, un homozygote DRB1\*03:04 et 13:01:01 serait typé incorrectement comme suit :

DRB1\*03:42 et 13:84

DRB1\*03:04 et 13:27

DRB1\*03:01:01:01,03:01:01:02,03:01:03,03:01:05,03:01:08,03:06,03:16,03:18,03:19,03:22,03:28,03:37  
et 13:84

### ***Mesures devant être prises par l'utilisateur :***

Pour les typages réalisés à l'aide de la méthode d'analyse d'interprétation manuelle qui ont déjà été effectués avec les kits concernés, les clients doivent passer en revue les résultats et les confirmer à l'aide des informations concernant les allèles et les sondes fournies dans la Description du problème ci-dessus. De plus, passez en revue les informations fournies dans cet avis de sécurité conjointement avec les tableaux d'interprétation spécifiques du kit existant afin d'effectuer une nouvelle analyse de tous les résultats douteux.

Le logiciel Pattern Matching Program (PMP), relatif aux fichiers de données d'interprétation destinés à des fins de recherche uniquement, ne sera pas concerné par cet écart. S'il est utilisé à d'autres fins que celles de diagnostic, il peut continuer à être utilisé.

Lors de l'utilisation de l'analyse d'interprétation manuelle, ce problème peut créer un mauvais typage et amener à une potentielle greffe d'organe ou de moelle osseuse avec une erreur d'appariement de résolution moyenne ou haute au niveau du locus DRB1. Puisqu'il arrive que la plupart des centres choisissent un donneur mal apparié, l'effet sur un rejet possible dépendra de la qualité de l'appariement sur tous les loci, autant que de la gestion médicale. L'existence d'une autre erreur d'appariement pouvant émaner de cet écart est limitée par les pratiques de typage à répétition à l'aide de méthodes multiples et de réactifs provenant de différents vendeurs.

**Vous devez immédiatement examiner votre stock pour savoir si vous possédez un ou plusieurs produits parmi ceux mentionnés plus haut. Dans ce cas, vous devez immédiatement arrêter de les utiliser et renvoyer le stock restant. Veuillez remplir le formulaire Confirmation du client, en inscrivant les produits et quantités utilisées. Pour les utilisateurs EN DEHORS de l'Union européenne, veuillez renvoyer cette confirmation par télécopie au numéro suivant (États-Unis) : Invitrogen Corporation : +1 414-214-4030**

**Pour les utilisateurs DANS l'Union européenne, veuillez renvoyer cette confirmation par télécopie au numéro suivant (Royaume-Uni) :**

**Invitrogen Ltd :  
+44 141 814 6258**

**Pour toute question, appelez l'assistance technique au 800-558-4511, poste 2.**

Cet avis doit être transmis à toutes les personnes concernées de votre organisation ou à toute organisation vers laquelle les dispositifs potentiellement concernés ont été transférés. En outre, veuillez partager cet avis avec les autres organisations qui risquent d'être affectées par cette action. Veuillez garder cet avis en tête pendant assez longtemps, ainsi que les mesures qui s'ensuivent, pour assurer l'efficacité des mesures correctives.

**Afin de confirmer que vous avez reçu et lu cet avis, veuillez nous faxer un exemplaire complété du formulaire fourni avec cet avis, à l'attention de :**

**Assistance technique Invitrogen Corporation :**

**+ 1 414-214-4030**

### ***Mesures correctives entreprises par Invitrogen :***

L'avis de sécurité DMR0000309 a été émis et les kits Locus DRB1 RELI SSO ont été retirés/rappelés du terrain.

**Contact :**

Pour les utilisateurs internationaux, en cas de question,  
veuillez contacter votre représentant Invitrogen local,  
envoyer un courrier électronique à **tech\_support@invitrogen.com** ou appeler  
le +1 800-558-4511 poste 2

Les utilisateurs en Europe peuvent également appeler le +44 141 814 6100  
pour obtenir de l'assistance.

*Avis de sécurité Numéro >*

DMR0000309

## CONFIRMATION DU CLIENT

**Veillez remplir ce formulaire dans les plus brefs délais et l'envoyer par télécopie aux numéros adéquats répertoriés sur la page suivante.**

Nous avons bien reçu et lu l'avis de sécurité urgent joint. Nous avons pris les mesures nécessaires suggérées par cet avis.

Concernant le rappel de :

Stock utilisé _____unités	Décrivez la façon dont les unités ont été utilisées :
Stock restant à retourner _____unités	N° de catalogue
	N° de contrôle/lot

**Nom de l'entreprise :** \_\_\_\_\_

**Adresse :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Numéro de téléphone :** \_\_\_\_\_

**Nom du directeur/superviseur  
(en caractères d'imprimerie) :** \_\_\_\_\_

**Signature :** \_\_\_\_\_

**Date :** \_\_\_\_\_

*Avis de sécurité Numéro >*

DMR0000309

**Adresse électronique :** \_\_\_\_\_

Pour les utilisateurs EN DEHORS de l'Union européenne, veuillez renvoyer cette confirmation par télécopie au numéro suivant (États-Unis) :

Invitrogen Corporation :

+1 414-214-4030

Pour les utilisateurs DANS l'Union européenne, veuillez renvoyer cette confirmation par télécopie au numéro suivant (Royaume-Uni) :

Invitrogen Ltd :

+44 141 814 6258

*Contact :*

Pour les utilisateurs internationaux, en cas de question, veuillez contacter votre représentant Invitrogen local, envoyer un courrier électronique à [tech\\_support@invitrogen.com](mailto:tech_support@invitrogen.com) ou appeler le +1 800-558-4511 poste 2

Les utilisateurs en Europe peuvent également appeler le +44 141 814 6100 pour obtenir de l'assistance.