

**Patient XX**

**Le 16 Février 2012,**

**Objet : Rappel de lot de bandelettes mylife™ Pura® boîte de 100**

*Madame, Monsieur, Cher utilisateur du lecteur de glycémie mylife™ Pura®,*

*Nous avons été informés d'une potentielle ouverture d'un flacon de bandelettes dans un très petit nombre de boîtes de 100 bandelettes mylife™ Pura® lors du transport entre le lieu de stockage en France et nos clients pharmaciens.*

*Les bandelettes réactives sont très sensibles à l'exposition à l'air et donc, si des bandelettes sont exposées à la chaleur, à l'humidité, à l'air libre, elles peuvent perdre leur qualité (accumulation de conditions : flacon ouvert + humidité + durée)*

*La conséquence peut être des résultats de glycémie anormalement élevés, pour lesquels le patient pourrait adapter de façon non appropriée son traitement et avec la conséquence potentielle d'une hypoglycémie.*

*Des actions préventives ont été prises en scellant les flacons avec un film protecteur*



**Conseil et action à destination de l'utilisateur :**

*Ne plus utiliser les Boîtes de bandelettes non scellés potentiellement concernées.*

*Rapporter les lots de bandelettes non-scellés potentiellement concernés au pharmacien chez lequel vous avez acheté ces bandelettes.*

*Tous les lots de bandelettes concernés seront échangés par le pharmacien par des lots de bandelettes scellés.*

**Numéro d'appel pour toute question : 0805 094010**

*Avec nos meilleures salutations,*

*L'équipe Ypsomed France*

Numéros de lots concernés.

1102246	1116106	1119214	110C094	1112152	1106283
1102248	1116284	1119303	110C074	1113146	1108125
1102249	1116294	111A053	110C075	110A063	1108126
1102254	1116295	110A192	1116013	110A061	1108127
1102255	1116274	110A285	1116151	110A137	1108131
1102256	1116231	110B094	1116152	1109277	1109132
1102257	1116232	110B124	1116091	1109294	1108246
1103015	1116242	110C136	1116106	1109295	1108275
1103022	1111242	110C095	111714A	1109297	1108276
1103023	1111241	110C138	1111267	110A014	1108273
1103024	1111244	110C137	1114274	110A015	1109086
1103029	1111243	110C143	1114275	1109293	1108277
1103161	1112106	110C144	1114266	110B093	1108305
1103162	1112107	110C163	1114276	110C221	1109028
1103163	1112151	110C164	1114277	110C224	1109025
1103164	110C292	110C146	1114281	110C291	1109026
1103184	110C301	110C145	1114282	110C292	1109082
1103223	110C302	110C165	1114283	110C222	1109085
1103261	1111123	110C222	1115048	1109233	1117147
1103262	1111124	110A141	1115056	1109274	1117213
1103263	110A254	1109153	1114284	1109275	1117225
1103264	110A253	1109095	1115103	1109276	1117292
1103295	110A261	110A057	1115053	1109296	1117272
1103297	110A263	110A293	1115115	1109304	1117273
1103302	110A272	110B172	1115054	110A017	1117285
1103303	110A273	110B183	1115057	1109298	1117125
1103304	110A286	110B184	1115045	110A012	1117153
1103314	110A291	110A294	1115055	110A013	1117143
1103315	110A292	110B223	1115058	110A016	1117131
1103316	110B097	110B224	1115104	110A055	1117145
1103317	110B104	110B262	1115132	1117295	1117132
1104017	110B123	110B263	1113015	1119072	1117146
1104018	110B126	110C023	1113016	1118047	1117133
1104220	110C095	110C024	1113017	1118184	1117155
1104221	110C134	110C022	1113043	1118033	
1104224	110C135	110C063	1113044	1118242	
1104235	110C072	110C073	1113075	1118252	
1104236	110C074	110C021	1113076	1118305	
1104274	1119292	110C064	1113112	1106045	
1104275	111A033	110C093	1113171	1106224	