

Bilzen, 28 Février 2012.

Lettre recommandée

Cher client,

Il est de notre devoir de vous informer qu'un de nos fournisseurs a constaté un problème technique dans une série de moteurs qui est utilisé dans les tables Gymna.

Certains de ces moteurs vous sont livrés chez vous par notre service après vente. Il s'agit de notre article 106850 (description: MOTOR, SGE14/DAK-113, 6000N, MAGNETIC), utilisé dans nos tables Gymna modèle 1995-2001.

Une défaillance apparaît quand on met la table dans la plus haute position et cette défaillance peut provoquer une chute brusque de la section supérieure . Jusqu' à présent, aucun cas de blessures n'a été mentionné.

Voici la liste des moteurs concernés, qui ont été livrés chez vous.

Date	Article	Description	#	facture	Cmde

Si ces moteurs sont encore dans votre stock, ayez l'obligeance de ne plus les utiliser. Si ces derniers ont été déjà montés sur une table Gymna, veuillez procéder comme suivant:

- 1.Demandez vos clients concernés de débrancher la table du secteur.
- 2.Informez-leurs qu'ils ne peuvent plus utiliser le moteur
- 3.Il faut marquer la table avec une étiquette " moteur hors d'usage"

La table peut être utilisée en hauteur fixe (alors débranchée, en ne changeant pas la hauteur)

Nous vous contacterons à nouveau, dès que nous aurons trouvé une solution pour résoudre ce problème.

Si vous avez encore des questions, n' hésitez pas à nous contacter.

Cordialement,

Bart de Bresser
CEO

Gymna Uniphy NV