

Neuilly-Plaisance, le 27 juillet 2012

Réf : FAN 915-304

Objet : Information de Sécurité –Transmission de Résultats Patient de l'AQT90 FLEX au Système d'Information de l'Hôpital/du Laboratoire (SIH/SIL)

Priorité : URGENTE

Madame, Monsieur,

RADIOMETER a identifié qu'un risque potentiel d'interversion entre résultats patient pouvait avoir lieu lorsqu'ils sont transmis au système SIH/SIL.

Produit concerné :

AQT90 FLEX avec les versions logicielles V8.3.40 et précédentes utilisant le protocole de communication HL7 V2.5 pour la transmission des résultats au SIH/SIL.

L'interversion survient si :

- La ligne de communication est interrompue ou déconnectée
- Deux ou plus, de résultats de patients sont en attente de transmission
- La communication est rétablie et que l'analyseur transmet les résultats en attente

Dans ces situations, le premier résultat sera transmis avec l'ID patient correcte, tandis que les résultats suivants seront transmis avec l'ID du premier patient.

RADIOMETER a développé une mise à jour du logiciel qui permettra d'empêcher la situation décrite ci-dessus d'avoir lieu. Cette mise à jour sera installée au plus tôt et en fonction de vos disponibilités.

Afin d'identifier le protocole de connexion utilisé par votre analyseur, merci de suivre la procédure suivante, de **compléter et de nous retourner par fax le Fax Accusé de Réception** ci-après.

Identification du protocole de connexion :

Appuyer sur **Menu>Progr.Opérateur>Configurations > Configurations générales >Communication>Connexions SIL/SIH** et noter le protocole présent dans la case **Protocole de haut niveau**.

Restant à votre écoute pour de plus amples informations, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour les désagréments occasionnés et vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

RADIOMETER S.A.S

FAX Accusé de réception

FAN 915-304

Produits concernés

Transmission des Résultats Patient de l'**AQT90 FLEX** au Système
d'Information de l'Hôpital / du Laboratoire (SIH/SIL)

Nous accusons réception des informations.

Protocole de connexion avec le SIL/SIH : _____

Logiciel SIL/SIH : _____

Insérer les coordonnées du fichier Excel

Signature

Date

Merci de faxer ce document au numéro suivant :

01 43 09 81 41