
Avis de sécurité

Objet : Lit électrique Hill-Rom™ 900—Rallonge de châssis de lit en option

N° d'identification FSCA : Mod 1201

Type d'action : Modification d'un appareil

Date :

À : Directeur général
Administrateur de l'établissement
Ingénieur de l'établissement
Directeur de la vigilance
Ingénierie biomédicale
Officier de liaison des dispositifs médicaux

Dispositifs concernés :

Modèles : HR900A avec rallonge de châssis de lit en option

Numéros de série concernés : HRP001435410 à HRP002027395

Dates de fabrication : entre le 1 juillet 2010 et le 31 mars 2011

Contexte :

Hill-Rom a remarqué que certains lits électriques HR900 présentent un risque pour la sécurité. La rallonge de châssis de lit en option peut ne pas se verrouiller correctement lorsqu'elle est complètement déployée. Le panneau de pieds ou la rallonge peuvent alors se détacher du lit et tomber sur le sol. Ceci représente un risque de blessure pour le personnel soignant.

Mesures à prendre :

Un représentant de Hill-Rom va prendre contact avec vous pour fixer un rendez-vous et réparer les lits concernés.

Avant notre visite, nous vous demandons de bien vouloir appliquer les instructions suivantes :

- Veuillez informer votre personnel qu'il ne faut **pas** utiliser la fonction rallonge des châssis de lit.
- Toutefois, si vous deviez utiliser la rallonge de châssis, faites-le avec une extrême attention ; tirez-la lentement jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique que le châssis est bien verrouillé. Veillez à ce que tout soit verrouillé comme il se doit. En cas de doute concernant l'utilisation de cette fonction, référez-vous au manuel de l'utilisateur.

- Si vous avez prêté ou vendu l'un des lits mentionnés dans la présente, veuillez transmettre une copie de cette lettre aux nouveaux propriétaires et prendre contact avec votre représentant pour l'informer de leur nouvelle adresse ou de leur nouveau propriétaire.

Diffusion du présent avis de sécurité :

Veuillez transmettre cet avis à toutes les personnes concernées au sein de votre organisation et, le cas échéant, à toute organisation où les lits en question ont été transférés.

Veuillez assurer l'application de cet avis et de ces directives aussi longtemps que nécessaire pour garantir l'efficacité des mesures correctives préconisées.

Hill-Rom confirme que les autorités compétentes ont été informées de cet avis de sécurité urgent.

Personne-ressource :

Pour toute question concernant cette demande ou la procédure ci-dessus, veuillez s'il vous plaît prendre contact avec l'assistance technique Hill-Rom :

Cordialement,

Assistance technique Hill-Rom