

Client
Hôpital
Ville
Code postal
Pays
À l'attention de :
Note de sécurité: version 1.4.0 à 1.5.3 AQUIRE

Niveau de priorité: Urgent

Cher client

RADIOMETER a été informé que les résultats des patients ne s'affichent pas correctement dans l'interface du logiciel AQUIRE® lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

- AQUIRE n'est pas configuré pour utiliser les unités du Système international (unité SI).
- Le résultat est situé en dehors des plages de référence définies

Par exemple:

- Un ABL mesurant un résultat pO₂ à 34mmHg (unité non SI) convertira et transmettra 4,5 kPa vers AQUIRE.
- AQUIRE ne faisant pas faire la conversion inverse, AQUIRE affichera 4,5 mmHg.

Il est important de noter que ce cas de figure n'apparaît que pour les paramètres pour lesquels l'unité sélectionnée est une unité non-SI, et lorsque le résultat mesuré est au-delà de la gamme de référence.

En cas d'erreur sur AQUIRE, la valeur transmise sur l'interface HIS / LIS est malgré tout correcte.

Le réglage par défaut pour AQUIRE est d'utiliser les unités SI pour tous les paramètres.

Produits concernés:

Version 1.4.0 à 1.5.3 AQUIRE

Correction produit:

L'erreur est corrigée dans la version 1.5.4 AQUIRE disponible pour la mise à jour depuis le 8 Mars.

L'ensemble du Parc AQUIRE France à d'ores et déjà été mis à jour.

Pour toutes questions supplémentaires, nous vous invitons à contacter votre représentant Radiometer.

Cordialement,
Radiometer SAS