

**Note de Sécurité Importante : Permobil Co-Pilot**

**Produit : Permobil Co-Pilot – Etiquetage produit avec instructions d'utilisation**

**Identification FSCA :** 444:2012/88289

**Type d'action :** Placement des étiquettes d'instructions sur le produit.

**Date:** 30 Janvier 2013

**A l'attention de :** Responsables sécurité produit / clients / utilisateurs du produit concerné.

**Produit concerné :** Commande tierce personne Co-Pilot  
P+ et R-net  
**Unités concernées :** Toutes



**Contexte :**

Permobil a reçu plusieurs rapports signalant que lors de l'utilisation de la commande tierce personne Co-Pilot, le fauteuil avançait seul. Lors de l'étude de ces incidents, Permobil a remarqué qu'une erreur d'utilisation spécifique en était la cause générale : l'application d'une charge sur la poignée lors de l'allumage du produit.

Dans le but d'éviter de nouveaux incidents, Permobil a décidé de transmettre l'information aux usagers en introduisant deux nouvelles étiquettes à ajouter sur le Co-Pilot.

Cette information est déjà présente dans le manuel d'utilisateur, mais elle sera désormais également disponible directement sur le produit.

**Actions à effectuer :**

Avec cette lettre vous sont adressées deux étiquettes qui doivent être ajoutées au Co-Pilot selon les instructions de montage ci-jointes. Merci de vérifier que les étiquettes soient placées correctement, lire le texte sur les étiquettes et vérifier que vous en avez compris le contenu.

Insistez tout particulièrement sur le fait qu'aucune charge ne doit être appliquée sur la poignée du Co-Pilot lors de son allumage.



**Retour d'information :**

En raison du caractère obligatoire du retour d'information, **le formulaire de retour ci-joint doit être complété et retourné dès que possible.**

**Diffusion de cet important message de sécurité :**

Merci d'envoyer une copie de cette lettre à tout le personnel concerné par cette information.

**Contact :**

Pour toute question concernant ce programme de sécurité, merci de contacter votre distributeur ou votre Service Technique Permobil.

Permobil  
Service Technique  
Tel. 04 37 26 27 25  
Fax. 04 37 26 27 24

[www.permobil.com](http://www.permobil.com)

---

---

## **Formulaire de retour**

**Objet : Permobil Co-Pilot – Etiquetage Produit avec instructions utilisateurs**

Merci de remplir ce formulaire avec les informations appropriées et le **retourner** dès que possible au **Service Technique Permobil**.

Instructions ci-dessous. Merci par avance.

---

---

Nom du client : \_\_\_\_\_

N° de série du châssis Permobil: \_\_\_\_\_

**Action effectuée :**

- Nous avons ajouté les étiquettes sur nos fauteuils Permobil équipé Co-Pilot concernés, nous avons également lu les instructions d'installation et compris **qu'aucune pression ne devait être appliquée sur la poignée Co-Pilot lors de l'allumage.**
- Inconnu, le fauteuil n'existe plus, pas de Co-Pilot monté sur le fauteuil, etc. (merci de renseigner le numéro de série)

Signature: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Tampon du distributeur :

---

**Instructions de Montage**

Document No. <b>253311</b>	Révision <b>A.00</b>				
Pays de Production					
Date de Création <b>2012-10-30</b>	Création Par <b>UDN</b>	Date de Validation	Validé Par		Page <b>1</b>

**Mise en place de l'autocollant et de l'étiquette d'instructions**

**Liste des éléments du kit.**

- 1x Autocollant
- 1x Ficelle

- 1x Etiquette d'instructions



321939



322014

614340



### Instructions de Montage

Document No. <b>253311</b>	Révision <b>A.00</b>				
Pays de Production					
Date de création <b>2012-10-30</b>	Création Par <b>UDN</b>	Date de Validation	Validé Par		Page <b>2</b>

