

«SITES»  
«SERVICE»  
«ADRESSE\_1»  
«ADRESSE\_2»  
«CP» «VILLE»

Neuilly Plaisance, Le 13 mars 2006

A l'attention: des Directeurs des établissements de santé  
des Correspondants de réactovigilance  
des Responsables de laboratoire

**Retrait de lot de flacon de rinçage pour les analyseurs Radiometer ABL 800 FLEX**

**Référence : 944-132 S4980**

**Lot : RD-02**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre politique de qualité, nous vous informons que les flacons de rinçage de référence 944-132 S4980 et du lot RD-02, peuvent être potentiellement défectueux.

Nature du défaut :

En raison d'une prise d'air, l'automate ne peut aspirer le liquide de rinçage. Ceci étant, le problème est bien détecté par l'automate qui affiche le message « erreur de rinçage » et qui rend indisponible l'appareil.

Action à prendre :

- En accord avec l'Afssaps, nous vous demandons de ne pas utiliser et de détruire les flacons référencés ci-dessus.
- **De nous renvoyer ce courrier par fax au 01.43.09.81.41, même si vous ne détenez pas les flacons référencés ci-dessus, au plus tard, le 24/03/06**
- Si vous détenez ces flacons, veuillez renseigner les informations ci-dessous. Un nombre équivalent de flacon vous sera envoyé dans les meilleurs délais, par nos soins.

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

**Dominique Tuaux**  
Spécialiste produits

**BORDEREAU A RETOURNER par fax au 01.43.09.81.41**

Date : \_\_\_\_\_

Etablissement : \_\_\_\_\_

Nom et fonction : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Nombre de flacons du lot RD-02 détenus : \_\_\_\_\_

Nombre de flacons du lot RD-02 détruits : \_\_\_\_\_