

-1/1-

**URGENT - Notification de sécurité produit
EasyUpgrade DR**

Risque de mauvaise interprétation de l'icône de miroir

Systèmes concernés	EasyUpgrade DR
Description du problème	L'icône de miroir située au bas de chaque image risque d'être prise, à tort, pour un repère de plomb DROIT signalant le côté droit du patient, si l'image est miroitée dans un système PACS.
Risques liés au problème	La mauvaise interprétation de cette icône comme désignant le côté droit du patient risque d'entraîner une erreur de diagnostic.
Identification des systèmes concernés	Tous les systèmes EasyUpgrades DR, codes système 712086.
Actions à mettre en œuvre par les utilisateurs du système concerné	Avec le système EasyUpgrade DR, un "R encerclé" miroité  est incrusté dans le coin inférieur droit de l'image (si celle-ci est miroitée). Lorsque cette image est miroitée à nouveau dans un système PACS, un "R encerclé" non miroité  apparaît dans le coin inférieur gauche de l'image. Ce repère peut être interprété comme désignant le côté droit du patient, bien qu'il apparaisse sur le côté gauche du patient.
Actions correctives menées par Philips Healthcare	Philips mettra à niveau le système, ce qui implique des mises à niveau logicielles et matérielles du système. Ce logiciel comporte une nouvelle icône  afin de réduire le risque de mauvaise interprétation de l'icône de miroir  Philips fournira également une mise à jour du Manuel d'utilisation pour le poste de travail et le système (comprenant un addenda). Philips vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour l'installation. Les Prévisions de disponibilité de la mise à niveau logicielle et la mise à jour du Manuel d'utilisation sont prévues dans les 6 mois à partir de début décembre Lors de vos communications avec Philips concernant ce programme, veuillez indiquer la référence FCO-71200077.
Informations Complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole